

TEST na gripę Influenza 1 sztuka HYDREX

Cena: 12,59 PLN



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	HYDREX DIAGNOSTICS SP. Z O.O.SP.K.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis Influenza A/B Test jest szybkim, jakościowym testem do wykrywania antygenów wirusa grypy typu A i B. Zasada działania testu oparta jest na metodzie immunochromatograficznej. Na pasku membrany w strefach testowych A i B zostały unieruchomione przeciwciała anty-influenza A i anty-influenza B. W początkowym odcinku paska testowego naniesiono koniugat barwnych cząstek z przeciwciałami anty-influenza A i B. Wykonanie oznaczenia polega na wyekstrahowaniu antygeny wirusa grypy typu A/B z badanej próbki i naniesieniu ekstraktu na płytkę testową. Antygen wirusa grypy typu A/B wiąże się z koniugatem barwnych cząstek z przeciwciałami anty-influenza A i anty-influenza B i tworzy się kompleks antygen-przeciwciało. Następnie ekstrakt przemieszcza się siłami kapilarnymi do unieruchomionych przeciwciał anty-influenza A/B w strefie testowej A i B, i powstaje barwny kompleks: przeciwciało - antygen wirusa grypy typu A/B - koniugat przeciwciała i tworzy się barwny prążek testowy A i/lub B. Brak barwnego prążka/barwnych prążków w strefie testowej świadczy o nieobecności antygeny wirusa grypy typu A/B w badanej próbce. Ekstrakt przemieszcza się dalej wzdłuż płytki i w strefie kontrolnej tworzy się barwny prążek kontrolny C. Obecność tego prążka świadczy o prawidłowym wykonaniu i działaniu testu oraz o dobrej jakości odczynników. Influenza A/B Test jest przeznaczony do użytku profesjonalnego do diagnostyki in vitro i może być stosowany tylko do jakościowego wykrywania wirusa grypy typu A lub B. Intensywność zabarwienia prążków lub ich szerokość nie mają znaczenia przy interpretacji wyniku testu. Wykrywane szczepy grypy A/Narita/1/2009 (H1N1)A/Hong Kong/8/68 (H3N2)A/Port Chalmers/1/73 (H3N2)A/WS/33 (H1N1)A/New Jersey/8/76 (H5N1)A/Mal/302/54 (H1N1)A/Anhui/1/2013 (H7N9)A/Shanghai/1/2013 (H7N9)A/Hong Kong/156/97 (H5N1)A/Hong Kong/483/97 (H5N1)A/Duck/Mongolia/119/2008 (H7N9)A/Duck/Mongolia/128/2008 (H7N9)A/Duck/Mongolia/147/2008 (H7N9)A/Duck/Mongolia/129/2008 (H7N9)A/Chicken/Yamaguchi/7/04 (H5N1)A/Chicken/Italy/99 (H7N1)A/Chicken/Netherlands/03 (H7N7)A/Swine/Hokkaido/2/81 (H1N1)A/Duck/Tottori/723/80 (H1N1)A/Duck/Hokkaido/17/01 (H2N3)A/Duck/Mongolia/4/03 (H3N8)A/Duck/Czech/56 (H4N6)A/Duck/Pennsylvania/10128/84 (H5N2)A/Turkey/Massachusetts/3740/65 (H6N2)A/Seal/Massachusetts/1/80 (H7N7)A/Turkey/Ontario/6118/68 (H8N4)B/R5B/Russia/69B/Lee/40 - Wyrób medyczny przeznaczony do samokontroli - posiada oznakowanie CE. - Posiada deklarację zgodności UE. - Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim.