

BLEND-A-DENT COMPLETE EXTRA STARK FRESH klej do protez zębowych 47 g

Cena: 17,89 PLN



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	47 g
Postać	-
Producent	PPHU MINI-MAXI IRENA WYDRA
Rodzaj rejestracji	Inny produkt
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis Zapewnia pewne umocowanie protezy przez cały dzień, zwiększa komfort noszenia dzięki warstwie amortyzującej między dziąsłami a protezą. Jest o świeżym miętowym smaku, opracowany specjalnie z myślą o kompleksowym działaniu i ochronie - pomaga zapobiegać przedostawaniu się resztek pokarmu pod protezę - bardzo mocno się trzyma. **Sposób użycia** Dokładnie wyczyścić protezę i dziąsła. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy nałożyć krople kleju w odstępach wzdłuż krawędzi i na powierzchniach protezy, które stykają się z jamą ustną. Przed założeniem protez wypłukać jamę ustną wodą. Mocno docisnąć protezę w odpowiednim miejscu i krótko przytrzymać. Dla najlepszych rezultatów należy wstrzymać się na 15-30 minut z jedzeniem lub piciem. **Skład** Calcium/Zinc PVM/MA Copolymer, Paraffinum Liquidum, Cellulose Gum, Petrolatum, Silica, CI 14720, Aroma, menthol, CI 16185, Limonene.