

BLEND-A-DENT COMPLETE EXTRA STARK ORIGINAL Klej do protez zębowych 2 x 47 g

Cena: 31,90 PLN



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	2 szt. po 47 g
Postać	-
Producent	PPHU MINI-MAXI IRENA WYDRA
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis Klej do protez Blend-a-dent to idealne rozwiązanie, jeśli nie chcesz nawet myśleć o swoich protezach. Klej do protez Blend-a-dent zapewnia pewne umocowanie protezy przez cały dzień, zwiększa komfort noszenia dzięki warstwie amortyzującej między dziąsłami a protezami oraz pomaga zapobiegać przedostawaniu się resztek jedzenia pod protezę. **Sposób użycia** Na wcześniej oczyszczoną i osuszoną protezę nałożyć cienkie paski kleju. Włożyć i docisnąć delikatnie. Zaleca się przez najbliższe 5 minut nic nie jeść ani nic nie pić. Aby usunąć protezę, wystarczy przepłukać usta ciepłą wodą. Delikatnie poruszając protezę, należy obluzować ją, a następnie wyciągnąć. Zakrętka i końcówka powinny być utrzymywane w czystości. **Skład** Calcium/Zinc PVM/MA Copolymer, Paraffinum Liquidum, Cellulose Gum, Petrolatum, Silica, Menthyl Lactate, CI 14720, Aroma, Menthol, Limonene.