

COREGA MAX Mocowanie+Świeżość krem mocujący do protez 40 g



Cena: 15,40 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	40 g
Postać	krem
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis COREGA MAX Mocowanie+Świeżość krem mocujący do protez 40 g Preparat zapewnia mocowanie protezy, utrzymując ją w odpowiednim miejscu nawet do 12 godzin. Precyzyjna końcówka pozwala na aplikację odpowiedniej ilości produktu. Wyjątkowo intensywny smak mięty zapewnia odświeżenie w jamie ustnej na cały dzień. **Sposób użycia** Sposób aplikacji kremu: Protezę należy umyć i wysuszyć. Nanieść krótkie paski kremu na protezę, niezbyt blisko jej krawędzi. Proteza górna: Nałożyć długim pojedynczym paskiem. Nałożyć 2 krótsze paski na środku protezy. Proteza dolna: Produkt nakładać długim ciągłym paskiem. Proteza częściowa: Nałożyć 2 krótkie paski. Wypłukać jamę ustną przed założeniem protezy. Założyć protezę, docisnąć ją i przygryźć na kilka sekund dla bezpiecznego trzymania.