

COREGA SUPER MOCNY Neutralny smak krem mocujący do protez 40 g

Cena: 16,75 PLN



Opis słownikowy

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Dawka | - |
| Opakowanie | 40 g |
| Postać | - |
| Producent | PPHU MINI-MAXI IRENA WYDRA |
| Rodzaj rejestracji | Wyrób medyczny inny |
| Substancja czynna | - |

Opis produktu

OpisKrem mocujący do protez zębowych Corega zapewnia mocne, trójwymiarowe mocowanie, dzięki czemu proteza pozostaje na miejscu przez cały dzień, dając uczucie komfortu. Co więcej, uszczelnia protezę i zapobiega dostawaniu się drobinom pokarmu pod jej powierzchnię. Krem w wyniku kontaktu z wilgocią (śliną) puchnie, sprawiając, że powietrze obecne między płytą protezy a tkanką jamy ustnej zostaje wyparte. Zmniejsza to puste przestrzenie między dziąsłami a protezą, a w konsekwencji umożliwia pacjentowi pewny zgryz i daje sposobność jedzenia zdrowszych, bardziej urozmaiconych pokarmów. Krem nie zawiera cynku, aromatów i barwników, a jego neutralny smak nie zmienia smaku spożywanych potraw. **Sposób użycia**Umyj i wysusz protezę. Przed włożeniem protezy do ust wypłucz jamę ustną. Nałóż kilka krótkich pasków kremu (6 mm) na protezę, niezbyt blisko jej krawędzi (jak pokazano na opakowaniu). Następnie włóż protezę, dociśnij ją mocno i przygryź na kilka sekund. Odczekaj kilka minut, zanim będziesz jeść lub pić. Jeżeli stosujesz krem po raz pierwszy, użyj małej jego ilości. Ustalenie właściwej ilości kremu może wymagać kilku prób. Zawsze przestrzegaj instrukcji stosowania podanych na opakowaniu. **Wyjmowanie protezy**Przed wyjęciem protezy zębowej przepłucz jamę ustną ciepłą wodą. Powoli wyjmij protezę, delikatnie nią poruszając. W celu usunięcia resztek kremu z protezy zanurz ją w roztworze tabletek czyszczących Corega według instrukcji stosowania i usuń pozostałości kremu szczoteczką. Aby usunąć krem mocujący z jamy ustnej, umyj dziąsła i podniebienie szczoteczką i ciepłą wodą. **Skład**Calcium/Sodium PVM/MA, Copolymer, Petrolatum (wazelina), Cellulose Gum, Paraffinum Liquidum (parafina ciekła).