

COREGA ŚWIEŻY ODDECH krem mocujący do protez 40 g

Cena: 16,95 PLN



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	40 g
Postać	-
Producent	PPHU MINI-MAXI IRENA WYDRA
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

OpisCorega Frisch Klej do Protez to innowacyjne rozwiązanie dla użytkowników protez dentystycznych. Krem samoprzylepny Corega Ultra Fresh nie tylko zapewnia solidne utrwalenie protezy przez cały dzień, ale również dostarcza dodatkowego odświeżenia dzięki zawartości świeżej mięty. Unikalna formuła kleju, pozbawiona cynku, gwarantuje pełną ochronę dziąseł i całkowite bezpieczeństwo dla zdrowia jamy ustnej. Korzystanie z Corega Frisch to nie tylko pewność trwałego utrwalenia protezy, ale także uczucie świeżości, które towarzyszy przez cały dzień. Wybierz produkt, który łączy skuteczność, bezpieczeństwo i komfort, i ciesz się pewnością uśmiechu. **Sposób użycia**Najpierw użyj niewielkiej ilości. W razie potrzeby użyj więcej. Zbyt duża ilość kremu adhezyjnego może powodować obrzęki boczne. Jeśli tak się stanie, następnym razem użyj mniej. Znalezienie odpowiedniej kwoty może zająć kilka prób. Używaj tylko raz dziennie dla bezpiecznego trzymania. Jeśli potrzebujesz użyć kremu przylepnego kilka razy dziennie, poproś dentystę o poradę. **Zastosowanie:** Oczyszczyć i osuszyć protezy. Nakładaj małymi paskami, nie za blisko krawędzi protezy. Wypłukać usta przed założeniem protezy. Włóż protezę, mocno dociśnij, a następnie zagryź przez kilka sekund, aby zapewnić bezpieczne trzymanie. **Usuwanie:** Wypłukać usta wodą. Poluzuj protezy powoli „ruchem kołyszącym”. Usuń pozostałości kremu adhezyjnego z protez i ust ciepłą wodą i miękką szczoteczką do zębów. Użyj Corega TABS, aby dokładnie wyczyścić protezy, a następnie dobrze spłucz je wodą. **Skład**Kopolimer wapnia / sodu PVM / MA, wazelina, guma celulozowa, parafina płynna, propyloparaben, aromat, CI 45430. Bez cynku.