


LH TEST OWULACYJNY paskowy 25 sztuk DOMOWE LABORATORIUM

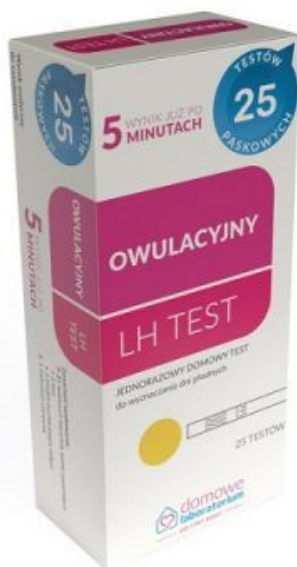

Cena: 33,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	25 szt.
Postać	-
Producent	HYDREX DIAGNOSTICS SP. Z O.O.SP.K.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis Owulacyjny LH test to doskonałe wsparcie dla wszystkich osób starających się o własne małżeństwo. Jest to w pełni profesjonalny, diagnostyczny test paskowy do domowego użytku, wykrywający tzw. pik LH, czyli nagły skok stężenia hormonu luteinizującego w moczu kobiety (minimum 30 mIU/ml), poprzedzający owulację, który wyznacza najdoskonalszy moment na poczęcie w całym cyklu miesięcznym kobiety. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu najbliższe 24-36 godzin możemy wykorzystać na staranie się o swoje dziecko, ponieważ właśnie wtedy mamy największe szanse na zapłodnienie. Samo przeprowadzenie testu jest naprawdę proste i błyskawiczne. Musimy jedynie pobrać próbki moczu do suchego i czystego pojemnika, a następnie zanurzyć w nim pasek testowy. Wyniki otrzymujemy po 5 minutach. Na ich odczytanie mamy jednak niewiele czasu, najlepiej jest to zrobić w ciągu jednej minuty, ponieważ później stają się one niewiarygodne. Dlatego warto na czas testu zaopatrzyć się w zegarek. Do analizy nie używamy pierwszego moczu porannego. Na 2 godziny przed badaniem nie powinno się również przyjmować żadnych płynów. Wszystko to może spowodować przekłamanie wyników. Przed zrobieniem testu owulacyjnego koniecznie należy zapoznać się z dołączoną do opakowania ulotką. Powyższe opakowanie zawiera aż 5 testów LH, umożliwiających przeprowadzenie 5 niezależnych badań. LH TEST należy przeprowadzać zawsze o tej samej godzinie, a jego wyniki zapisywać. Dzięki temu stworzymy kalendarz dni płodnych, który ułatwi nam staranie się o wymarzone dziecko. Zdjęcie przedstawia opakowanie z 2018 roku, w sprzedaży mogą pojawiać się również starsze opakowania. Skład opakowania: 25 foliowych szczelnie zamkniętych kopertek, w każdej znajdują się: 1 test strumieniowy i 1 środek pochłaniający wilgoć 1 instrukcję używania wyrobu. Przed wykonaniem badania należy przygotować papierowy ręcznik i zegarek, który będzie potrzebny do odmierzenia czasu odczytu wyniku testu.