


ACTIVE MED kubeczek menstruacyjny rozmiar L fioletowy

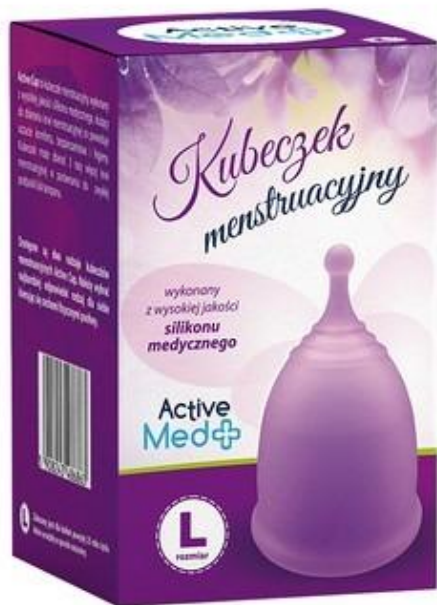

Cena: 53,49 PLN

Opis słownikowy

Producent	Tradix Group
Rodzaj rejestracji	Inny produkt

Opis produktu

Wskazania Rozmiar L zalecany jest dla kobiet powyżej 25 roku życia lub które urodziły w sposób naturalny. Kubeczki menstruacyjne Active Med zapewniają kobietom bezpieczniejszą i dłuższą ochronę szczególnie, w sytuacjach, takich jak pływanie, korzystanie ze SPA czy podczas wykonywania różnego rodzaju wysiłku fizycznego. **Działanie** Zalety medycznego silikonowego kubeczka menstruacyjnego: 1) Zapewnia bezpieczeństwo w stosowaniu, nie uczula 2) wygodne, czyste, nietoksyczne, nieszkodliwe, trwałe, elastyczne, łatwe i wygodne w użyciu 3) 100% silikonu medycznego, nie zawiera BPA, lateksu i ftalanów 4) wielokrotnego użytku, przyjazny dla środowiska, ekonomiczny 5) szczelna ochrona sprawia, że kubki mogą być używane do 12 godzin bez ich opróżniania, co jest wysoce komfortowe w podróży, podczas pływania lub ćwiczeń fizycznych 6) regularne stosowanie może zmniejszyć ryzyko zapalenia ginekologicznego 7) posiada elastyczne opakowanie **Sposób użycia** Sposób użycia: 1) należy złożyć kubeczek na pół a) ścisnąć środek silikonowego kubeczka palcem wskazującym i kciukiem b) następnie zaaplikować do pochwy c) dopasuj do swojego kształtu anatomicznego tak aby wystający uchwyt ułożył się równoległe do pochwy i nie wystawał na zewnątrz 2) Po upływie odpowiedniego czasu aplikacji, ostrożnie wyjmij kubeczek z pochwy, opróżnij z krwi menstruacyjnej, dokładnie umyj i w miarę potrzeby użyj ponownie **Sposób wyjmowania:** Kubeczek należy opróżniać co najmniej raz na 12 godzin, w zależności od intensywności miesiączki. Przed usunięciem kubeczka umyj dokładnie ręce, zrelaksuj się, przyjmij wygodną pozycję: stojącą, siedzącą na toalecie lub w kucki. Umieść kciuk i palec wskazujący w pochwie aby zlokalizować podstawę i uchwyt kubeczka. Następnie delikatnie pociągnij za uchwyt, aż będziesz mogła wygodnie i wystarczająco mocno trzymać podstawę kubeczka. Po wyjęciu, należy trzymać kubeczek pionowo, tak aby zawartość się nie wylała. Następnie opróżnij zawartość do toalety. Umyj kubeczek czystą wodą, najlepiej ciepłą, jest on gotowy do następnego użycia. Pamiętaj aby dokładnie umyć otwory ssące. Do mycia możesz również używać nieperfumowanego mydła o neutralnym pH. Jeśli nie masz dostępu do czystej wody, możesz również użyć papieru toaletowego lub chusteczki do wytarcia kubeczka i umyć go wodą później. **Dodatkowe informacje** zwiększające bezpieczeństwo użycia kubeczka menstruacyjnego: 1) Kubek najlepiej sterylizować i dezynfekować w przegotowanej, czystej wodzie lub na parze przed każdym użyciem. 2) Podczas aplikacji upewnij się, że wystająca końcówka kubeczka jest równoległa do pochwy, aby uniknąć podrażnienia pochwy 3) Jeśli czujesz się nieswojo, ponieważ uchwyt kubeczka wystaje na zewnątrz, możesz ją skrócić częściowo lub całkowicie zgodnie z z osobistymi potrzebami. 4) Kubeczki można umyć pod bieżącą wodą lub przepłukać kwasem mlekowym, wtedy mamy pewność, że kubeczek można użyć bezpiecznie kolejny raz 5) kubki menstruacyjne Active Med są miękkie i gładkie. Dzięki materiałowi z którego jest wykonany nie ma specyficznego zapachu podczas używania. Wytrzymały silikon medyczny idealnie utrzymuje krew menstruacyjną w kubeczku. W związku z tym, możesz być spokojna, aby używać go podczas pływania lub innych ćwiczeń fizycznych. **Ważne wskazówki:** używaj kubeczka tylko zgodnie z instrukcją i tylko podczas menstruacji

- kubeczek należy zawsze usunąć przed stosunkiem i pamiętać że nie jest metodą antykoncepcyjną i nie chroni Cię przed chorobami przenoszonymi drogą płciową. Kubeczek menstruacyjny jest produktem do higieny osobistej, nie należy zatem nikomu go udostępniać. Do czyszczenia nie należy używać agresywnych środków czyszczących lub środków odkażających. Do ułatwienia aplikacji nie należy używać lubrykantów na bazie olejów. Nigdy nie trzymaj kubeczka w plastikowej torebce lub hermetycznym pojemniku bez dostępu do powietrza. Podczas podróży, do mycia kubeczka używaj wody pitnej. W przypadku pieczenia, podrażnienia, zapalenia narządów płciowych, dyskomfortu podczas oddawania moczu lub innych objawów które uważasz za nieprawidłowe, natychmiast usuń kubeczek i skonsultuj się z lekarzem. W przypadku uszkodzenia kubeczka, należy go zastąpić nowym. Trzymaj poza zasięgiem dzieci.

Skład Opakowanie zawiera: 1 kubeczek menstruacyjny, ulotkę informacyjną, 1 bawełniany woreczek ochronny.