

AKUKU Termofor z pestkami wiśni 13 x 16 cm żółty (A0636)

Cena: 16,99 PLN



Opis słownikowy

Producent	ALBIS MAZUR SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Artykuł dziecięcy

Opis produktu

Opis AKUKU Termofor z pestkami wiśni 13 x 16 cm żółty (A0636) Termofor wykonany jest z odpowiednio dobranych i osuszonych pestek wiśni. Jest w 100% bezpieczny i przyjazny dla dziecka. Produkt ten nie posiada płynów które mogą się rozlać. Po podgrzaniu utrzymuje temperaturę do 1 godziny. Naturalnie oddaje ciepło co eliminuje możliwość poparzenia i uszkodzenia skóry. Kształt idealnie nadaje się na małe brzuszki. Zastosowanie termoforu na gorąco: kolki noworodkowe, wzdęcia, bóle kulszowe, bóle mięśni, bóle menstruacyjne. Zastosowanie termoforu na zimno: ugryzienia owadów, gorączka, siniaki, guzy, migrena. **Sposób użycia** – Grzanie: Termofor umieścicie w kuchence mikrofalowej (600 W / około 90 sekund), piekarniku (130 °C / około 10 min.) lub na innym źródle ciepła np. grzejnik. **NIGDY NIE GRZEJ WKŁADU Z POKROWCEM. UWAGA** – nie stosuj rozgrzanego termoforu na choroby serca, żył, ostrych stanów zapalnych. Po nagraniu się termoforu wymieszaj pestki i sprawdź temperaturę na nadgarstku. Na zimno: Włóż termofor z pokrowcem do zamrażalnika na około 60 min lub do lodówki na około 2 godziny. Pamiętaj aby zabezpieczyć go przed kontaktem z żywnością. Pokrowiec można prać ręcznie, lub w pralce w temp 30° **NIGDY NIE PIERZ WKŁADU Z PESTKAMI**. Produkt nie jest zabawką – zawiera małe elementy które dziecko może połknąć. Przed każdym użyciem należy sprawdzić czy produkt nie posiada uszkodzeń. W przypadku zużycia/zabrudzenia wkładu wymień go na nowy