

AKUKU Termofor z pestkami wiśni A0690 niebieski, 1 szt.



Cena: 15,70 PLN

Opis słownikowy

Producent	ALBIS MAZUR
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

OpisAKUKU Termofor z pestkami wiśni niebieski A0690

Termofor AKUKU wykonany jest z odpowiednio dobranych i osuszonych pestek wiśni.

100% bezpieczny i przyjazny dla dziecka. Nie posiada płynów, które mogą się rozlać. Po podgrzaniu utrzymuje temperaturę **do 1 godziny**. Naturalnie oddaje ciepło, co **eliminuje możliwość poparzenia i uszkodzenia skóry**. Kształt idealnie nadaje się na małe brzuszki. Zdemontowany pokrowiec, który można wyprać. Rozmiar 15 x 20 cm.

Zastosowanie termoforu na gorąco:

kolki noworodkowe, wzdęcia rwa kulszowa bóle mięśni bóle menstruacyjne

Zastosowanie termoforu na zimno:

ugryzienia owadów gorączka siniaki, guzy, migrena

Sposób użycia:

Grzanie:Termofor należy umieścić w kuchence mikrofalowej (600 W/ około 90 sekund), piekarniku (130°/ około 10 min.) lub na innym źródle ciepła, np. grzejnik. **NIGDY NIE GRZEJ WKŁADU Z POKROWCEM**. Ostrzeżenie: Nie stosuj rozgrzanego termoforu w przypadku chorób serca, żył, czy ostrych stanów zapalnych. Po nagraniu się termoforu wymieszaj pestki i sprawdź temperaturę na nadgarstku.

Na zimno:Włożyć termofor bez pokrowca do zamrażalnika na około 60 min. lub do lodówki na około 2 godziny. Pamiętaj, aby zabezpieczyć go przed kontaktem z żywnością.

Pokrowiec można prać ręcznie lub w pralce w temp. 40° **NIGDY NIE PIERZ WKŁADU Z PESTKAMI**.

Ostrzeżenie: Produkt nie jest zabawką - zawiera małe elementy, które dziecko może połknąć - ryzyko zadławienia.

Skład:

woreczek materiałowy - 100% bawełna + wypełnienie: pestki wiśni 150 g, pokrowiec zewnętrzny - 100% bawełna.

Podmiot odpowiedzialny:

ALBIS MAZUR SP. Z O.O.