

APTEO CARE Aspirator do nosa



Cena: 13,95 PLN

Opis słownikowy

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Opis Aspirator do nosa dla dzieci APTEO: szybko i delikatnie pozwala usuwać wydzielinę z noska dziecka za pomocą zasysania powietrza, pomaga przywrócić dziecku swobodne oddychanie podczas snu lub karmienia, przy systematycznym oczyszczaniu noska ogranicza oraz zapobiega infekcjom górnych i dolnych dróg oddechowych, bezpieczny w użyciu i łatwy do czyszczenia, przeznaczony dla dzieci od 1. dnia życia. **Sposób użycia** 1. Ułożyć dziecko w pozycji leżącej twarzą do góry. 2. Końcówkę aspiratora należy delikatnie włożyć do otworu nosowego dziecka i umieścić ustnik w ustach osoby wykonującej czynność. 3. Wciągnąć delikatnie powietrze przez ustnik. Powoli i stopniowo zwiększać siłę ssącą, dopóki wydzielina nosowa nie zacznie gromadzić się w zbiorniku. 4. W razie konieczności czynność powtórzyć. 5. Powtórzyć czynności w drugim otworze nosowym. Jeżeli wydzielina jest zbyt sucha lub zbyt gęsta, wkropić do nosa niewielką ilość soli fizjologicznej.