

APTEO Paski do zamykania ran, zestaw w kolorze cielistym, 14 szt.



Cena: 8,13 PLN

Opis słownikowy

CE	1639
Opakowanie	14 szt.
Producent	SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis APTEO Paski do zamykania ran, zestaw w kolorze cielistym, 14 szt.

Paski do zamykania ran w kolorze cielistym,

Cechy:- nieinwazyjne zamykanie drobnych ran i cięć, - sterylne, - w kolorze skóry, - wytrzymałe i elastyczne,- łatwe w użyciu, - dobrze przylegają do skóry,- hipoalergiczny klej.

Sposób użycia

1. Oczyszczyć ranę i skórę w pobliżu rany, pozostawić do całkowitego wyschnięcia.2. Wyciągnąć paski z saszetki oraz odklejać pojedynczo z papieru ochronnego bezpośrednio przed użyciem.3. Zbliżyć starannie do siebie oba brzoży rany i rozpoczynając od środka, umieścić pierwszy pasek prostopadłe do rany. Unikać naprężania podczas przyklejania.4. Przykleić kilka pasków około 2-3 mm od siebie.5. Aby usunąć pasek, odklej ostrożnie oba końce w kierunku zranionego miejsca.

Ważne

Środki ostrożności: Zużyć natychmiast po otwarciu saszetki.Nie stosować na poważne, głębokie i rozległe rany.Opatrunek należy zmieniać co 24 godziny lub jeśli zamoknie.W przypadku nadmiernego krwawienia z rany, podrażnienia lub zakażenia skóry, należy usunąć pasek.Przed zastosowaniem u osób chorujących na cukrzycę należy skontaktować się z lekarzem.

Uwaga! W rzadkich przypadkach u dzieci może pojawić się wysypka spowodowana ciepłem i wilgocią, szczególnie na twarzy. W takim przypadku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Producent

Synoptis Pharma Sp. z o.o.