


AQUA-GEL Opatrunek hydrożelowy 5 cm średnicy 5 sztuk

Cena: 19,59 PLN

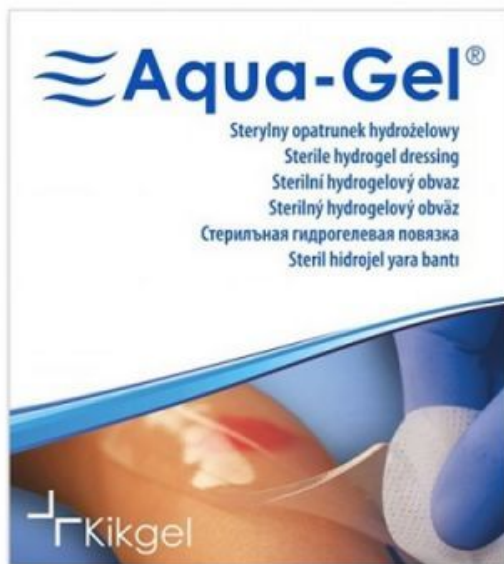

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	5 szt.
Postać	-
Producent	KIKGEL SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

OpisAQUA-GEL Opatrunek hydrożelowy 5 cm średnicy 5 sztukAqua-Gel sterylny opatrunek hydrożelowy do opatrywania ran o umiarkowanym wysięku, pokrytych martwicą lub znajdujących się w fazie epitelializacji. Aqua-Gel tworzy wilgotne środowisko wspomagające naturalne procesy autolitycznego oczyszczania się rany i przyspieszające namnażanie nowych komórek wzrostu. Opatrunek dobrze przylega do rany, jednak nie przywiera do niej, dzięki czemu zmiana jest bezbolesna dla pacjenta. Absorbując wysięk z rany, zatrzymując go wewnątrz swojej struktury wraz z drobnoustrojami. Opatrunek jest elastyczny i łatwy w formowaniu, przez co dobrze przylega również do anatomicznie trudno dostępnych miejsc (twarz, okolice stawów).Oparzenia I-go, II-go oraz III-go stopnia (termiczne, chemiczne, elektryczne).Oparzenia słoneczne.Owrzodzenia.Odleżyny.Inne rany przewlekłe (np. stopa cukrzycowa).Otarcia, stłuczenia, obrzęki.**Sposób użycia**Opatrunek umieszcza się dowolną stroną na powierzchni rany.Należy stosować opatrunki o wielkości odpowiadającej rozmiarom rany.Opatrunek należy zabezpieczyć przylepcem włókninowym, folią adhezyjną lub bandażem elastycznym.Opatrunek może być stosowany w kompresjoterapii w przypadku owrzodzeń żylnych.Sposób aplikacji opatrunku: rozerwij torebkę i wyjmij foremkę z opatrunkiem.Trzymając za cienką folię oraz wystający materiał włókninowy wyjmij hydrożel z foremki.Zdejmij cienką folię przykrywającą opatrunek.Umocuj opatrunek za pomocą przylepca włókninowego, folii poliuretanowej lub bandaża.**Skład**Woda 90%, polimery.**Ważne**Opatrunku nie należy używać, jeśli foliowa torebka jest otwarta lub uszkodzona.Wierzchnia folia ułatwia wyjęcie opatrunku, dlatego nie należy zdejmować jej przed wyjęciem opatrunku z foremki.Należy zawsze stosować opatrunki wielkości odpowiadającej rozmiarom rany.Pomimo tego, iż opatrunek jest elastyczny nie należy go rozciągać przy nakładaniu na ranę i uważać, aby przylegał do zdrowej skóry wokół rany.Opatrunek wyjęty z opakowania, a niewykorzystany, traci jałowość i nie może być użyty w późniejszym czasie.Opatrunek przeznaczony jest do jednorazowego użycia. Ponowne użycie stwarza ryzyko zakażenia rany.Zalecany czas utrzymania opatrunku na ranie wynosi 48 godzin.Częstotliwość zmiany opatrunku uzależniona jest od ilości wysięku wytwarzanego przez ranę.