

## ASPIRATOR do nosa Fridababy Nosefrida 1 sztuka



Cena: 22,34 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	PROFIMED SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

### Opis produktu

**Opis** Przy zatkany nosku. Właściwości: Urządzenie jest przeznaczone do oczyszczania nosa u dzieci w wieku 0+. Aby zapobiec przedostaniu się wydzieliny lub bakterii do wężyczka, powinien być założony jednorazowy filtr. Należy przyłożyć końcówkę tuby do nozdrza dziecka tak aby szczelnie przylegała (nie wkładać do wewnątrz). Wciągnąć powietrze przez czerwony ustnik, zachowując należyta ostrożność. **Sposób użycia** Przed użyciem aspiratora wprowadzić roztwór soli fizjologicznej do każdego otworu nosowego, co pomoże w rozrzedzeniu gęstej wydzieliny. Tubę poruszać okrężnymi ruchami w otworze nosowym. Filtr należy wymieniać po każdorazowym użyciu. Końcówkę aspiratora umieścić delikatnie w otworze nosowym dziecka, następnie lekko zassać końcówkę rurki. Wydzielina z nosa będzie widoczna w przezroczystym pojemniku. Po każdym użyciu należy wyjąć zużyty filtr i wyczyścić aspirator, można to zrobić za pomocą delikatnego detergentu z dodatkiem ciepłej wody, dokładnie umyć, a następnie osuszyć. Wężyk osuszyć lub wyczyścić używając kilku kropli alkoholu izopropylowego. Umieścić filtr w otworze zatyczki i założyć na tubę - do usłyszenia "kliknięcia". **Bezpieczeństwo:** Tuby nie należy wkładać do środka nosa aby nie zranić dziecka w przypadku gdy się poruszy. Aspiratora używać wyłącznie do czyszczenia nosa - NIE używać do uszu czy gardła. NIE DMUCHAĆ w ustnik gdy tuba jest umieszczona w nosie dziecka. Aspirator NIE jest zabawką, trzymać wszystkie części z dala od dzieci. NIE podłączać aspiratora do mechanicznych przyrządów ssących