

BABYCAP Aspirator do nosa dla niemowląt

Cena: 11,99 PLN



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	CAPEYPHARMA SP. Z O.O. S.K.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis W JAKIM CELU STOSUJE SIĘ BABYCAP ASPIRATOR DO NOSA U NIEMOWLĄT? Niemowlęta i małe dzieci do 1 roku życia oddychają wyłącznie przez nos a więc nie potrafią wydmuchać zalegającej w nim wydzieliny. W związku z tym stosowanie aspiratora w tym wieku jest niezbędne aby niemowlę miało ułatwione oddychanie. **Sposób użycia** PRZYGOTOWANIE BABYCAP ASPIRATORA DO NOSA DLA NIEMOWLĄT: 1. Umyć ręce, 2. Złożyć BabyCap aspirator do nosa dla niemowląt zgodnie ze schematem, 3. Umieścić mały kawałek waty, który posłuży za filtr między końcówką aplikatora, a zbiornikiem. PRZYGOTOWANIE NIEMOWLĘCIA: ułożyć dziecko w pozycji leżącej i podnieść jego głowę, wziąć ustnik aspiratora do ust, przyłożyć końcówkę aspiratora do jednego z otworów nosowych niemowlęcia, wciągać delikatnie powietrze. Wydzielina będzie gromadzić się w zbiorniku, w razie konieczności, powtórzyć czynność, następnie powtórzyć czynność z drugim otworem nosowym. Aplikacja izotonicznego roztworu wody morskiej do każdego z otworów nosowych ułatwia aspirację wydzieliny.