

## BLEND-A-DENT DUO POWER Klej do protez zębowych 40 g

Cena: 15,90 PLN



### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	40 g
Postać	-
Producent	PROCTER & GAMBLE
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

### Opis produktu

**Opis** BLEND-A-DENT DUO POWER Klej do protez zębowych **NOWOŚĆ! 40 g** Wyrób medyczny Blend-a-dent Plus Dual Power to wysokiej jakości klej do protez. Wyrób medyczny Blend-a-dent Plus Dual Power zapewnia solidne umocowanie protezy, które utrzymuje ją na miejscu przez cały dzień. Dzięki warstwie amortyzującej między dziąsłami a protezą, zapewnia indywidualne dopasowanie oraz zabezpieczenie przed przedostawaniem się drobinek pokarmów. Bezsmakowa formuła nie wpływa na smak potraw. **Sposób użycia** Wyczyść i osusz protezę, dokładnie oczyść dziąsła. Nałóż klej punktowo wzdłuż krawędzi i na powierzchni protezy. Jamę ustną przepłucz wodą. Włóż protezę i dociśnij przez chwilę. Odczekaj 15-30 minut przed ponownym jedzeniem i piciem. **Skład** Calcium/Zinc PVM/MA Copolymer, Paraffinum Liquidum, Cellulose Gum, Petrolatum, Silica, CI 45410.