

## BLEPHA EYEBAG maska na oczy rozgrzewająca

Cena: 115,90 PLN



### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	THEA POLSKA SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

### Opis produktu

**Opis** Blepha Eyebag rozgrzewająca maska na oczy, 1 szt. Wyrób medyczny. Łatwa i wygodna w stosowaniu: do podgrzewania w kuchenke mikrofalowej. Wielokrotnego użytku: można bezpiecznie i skutecznie stosować do 200 razy. Produkt opracowany przez okulistę i polecany przez okulistów. Potwierdzona skuteczność i bezpieczeństwo. Wskazania BLEPHA EYEBAG: Wspomaga leczenie dysfunkcji gruczołów Meiboma\* (MGD) oraz zapalenia brzegów powiek. Zapewnia komfort i łagodzi objawy zespołu suchego oka towarzyszące MGD (MGD to główna przyczyna tej dolegliwości) oraz innym chorobom oczu, takim jak: jęczmień i gradówka. Może także łagodzić dyskomfort związany z noszeniem soczewek kontaktowych odczuwany przez osoby cierpiące na zespół suchego oka. Stosować wyłącznie do oczu. Zalety, skuteczność, sposób działania. Maska BLEPHA EYEBAG to wyrób opracowany przez okulistę, cechujący się skutecznością i bezpieczeństwem stosowania potwierdzonymi w kilku badaniach klinicznych. Maska BLEPHA EYEBAG działa szybko i długo, łagodząc objawy takie jak: wrażenie suchego oka, dyskomfort, zmęczenie lub ból oczu, zaczerwienienie oczu, chropowatość, wrażenie obecności ciała obcego w oku czy pieczenie. Ponadto łagodzi obrzęk i stan zapalny powiek. BLEPHA EYEBAG to łatwa i wygodna w użyciu maska rozgrzewająca, którą można stosować na co dzień, by zapewniać oczom komfort. Na brzegach górnej i dolnej powieki oka znajdują się małe gruczoły, zwane gruczołami Meiboma, które wydzielają oleistą substancję niezbędną do zapewnienia poślizgu i oczyszczenia przedniej części oka oraz skutecznego rozprowadzania filmu łzowego. Gdy gruczoły te nie działają prawidłowo, substancja z oleistej zamienia się w gęstą i zatyka gruczoły. Tym samym przednia część oka przestaje być odpowiednio powleczona substancją natłuszczającą. W przypadku MGD, zapalenia brzegów powiek oraz schorzeń powiązanych, takich jak zespół suchego oka, jęczmień czy gradówka, okuliści zalecają rozpoczęcie procesu oczyszczania oczu od rozgrzania powiek. Dzięki działaniu rozgrzewającemu maska BLEPHA EYEBAG naturalnie wspomaga zdrowie oczu, gdyż pomaga uwolnić zablokowaną oleistą substancję i rozprowadzić ją po powierzchni oka. Tym samym ogranicza proces parowania łez i zapewnia oczom nawilżenie. **Sposób użycia** Częstotliwość stosowania: Przez pierwsze 2 tygodnie stosować BLEPHA EYEBAG, dwa razy dziennie, rano i wieczorem, przez 5 - 10 minut. Po pierwszych 2 tygodniach wyrób zazwyczaj stosuje się 3-4 razy w tygodniu, ale częstość stosowania można zmieniać w zależności od nasilenia objawów. **Ważne** Natychmiast po ogrzaniu, rozmasować zamknięte powieki, aby uwolnić upłynioną, oleistą wydzielinę z gruczołów Meiboma. Powtórzyć to kilka razy przez około 30 sekund. Po użyciu maski BLEPHA EYEBAG warto także oczyścić powieki za pomocą produktów przeznaczonych do oczyszczania powiek. BLEPHA EYEBAG można bezpiecznie i skutecznie stosować do 200 razy, a potem należy maskę wymienić. Każde podgrzanie w kuchenke mikrofalowej zmniejsza ilość bakterii na masce BLEPHA EYEBAG do minimum. **Skład** Naturalny jedwab i bawełna, nieprzetworzony len (siemię lniane). Nie zawiera substancji pomocniczych ani tworzyw sztucznych. Opakowanie i ulotka są biodegradowalne oraz nadają się do ponownego przetworzenia. **Producent** Laboratoires Théa / Thea

Polska Sp. z o.o., ul. Cicha 7, 00-353 Warszawa