

CAYA DIAFRAGMA Inserter + Remover do wkładania i wyjmowania diafragmy antykoncepcyjnej

Cena: 54,99 PLN



Opis słownikowy

Producent	MEDINTIM
Rodzaj rejestracji	Inny produkt

Opis produktu

Opis Aplikator Medintim ułatwia zakładanie i wyjmowanie membrany antykoncepcyjnej. Jest idealna dla kobiet, które po raz pierwszy używają przepony i które nie czują się komfortowo w dłoniach podczas zakładania lub wyjmowania przepony antykoncepcyjnej. **Wskaźniki:** Aplikator jest w 100% wielokrotnego użytku i higieniczny. Aplikator ułatwia zginanie diafragmy i nakładanie żelu antykoncepcyjnego. Zapewnia prawidłowe ułożenie membrany antykoncepcyjnej, która zakrywa szyjkę macicy i zapewnia skuteczną ochronę podczas stosunku płciowego. **Sposób użycia** Aplikator membranowy ma dwie różne strony. Strona 1 służy do wprowadzania, strona 2 do wyjmowania membrany. Trzymaj aplikator jedną ręką. Drugą ręką przytrzymaj membranę na poziomie kołków mocujących, aby ją wygiąć. Membranę najpierw mocuje się po haczykowej stronie w jednym z nacięć (w środku pręta). Podłużna membrana powinna być teraz przymocowana do aplikatora, a membrana skierowana w stronę pręta. Na złożoną diafragmę nałożyć około 4 ml żelu antykoncepcyjnego. Wprowadzić aplikator z diafragmą jak najgłębiej w tylną część pochwy. Dobra połowa aplikatora z diafragmą jest teraz włożona i diafragma nie jest już widoczna z zewnątrz. Przekręć aplikator, aby zdjąć membranę z wału. W razie potrzeby sprawdź palpacyjnie, czy przepona zakrywa szyjkę macicy i znajduje się w zagłębieniu przed kością łonową. Aby wyjąć diafragmę, włóż aplikator z haczykiem (strona 2) na kilka centymetrów do pochwy. Umieść haczyk pręta za przednią krawędzią membrany i zaczep go. W ten sposób przepona może zostać usunięta z pochwy. Aplikator membranowy umyć mydłem i wodą przed i po użyciu. Przy starannym stosowaniu aplikator ma długą żywotność i jest wielokrotnego użytku.