

CICA-CARE Plaster żelowy na blizny samoprzylepny 12 cm x 6 cm

Cena: 48,90 PLN



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	SMITH & NEPHEW
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis CICA-CARE Plaster żelowy na blizny samoprzylepny 12 cm x 6 cm Opatrunek na blizny Cica-Care to silikonowy opatrunek na rany wielokrotnego użytku zalecany do stosowania w leczeniu blizn przerostowych i keloidów. Opatrunek Cica-Care jest cienki i wygodny. Dzięki swoim właściwościom rozjaśnia blizny, aż do uzyskania naturalnego koloru skóry. Opatrunek na blizny Cica-Care: zatrzymuje wilgoć w obszarze otaczającym bliznę, redukuje nadmierne odkładanie kolagenu. Plaster jest samoprzylepny, może być cięty w zależności od wielkości blizny, łatwy w usunięciu. Opakowanie zawiera 1 sztukę opatrunku o wymiarach 12x6 cm. **Sposób użycia** Opatrunek wielokrotnego użytku, nawet do 40 razy. Czyszczony przy użyciu mydła. Przycięty opatrunek umieścić na oczyszczonej bliznie, nie naciągać. Przez pierwsze dwa dni pozostawić opatrunek na 4 godziny dziennie. Podczas kolejnych dwóch dni przedłużyć czas do 8 godzin. Następnie systematycznie zwiększać czas noszenia opatrunku o 2 godziny aż do uzyskania 24 godzin na dobę. **Ważne** Zalecane jest czyszczenie opatrunku Cica-Care dwa razy dziennie. Jednak w przypadku wzmożonej aktywności fizycznej należy zwiększyć częstotliwość mycia w celu zachowania maksymalnego kontaktu pomiędzy plastrem Cica-Care a leczonym obszarem. Materiał używany do osuszania opatrunku nie powinien pozostawiać na jego powierzchni zanieczyszczeń. Blizna oraz okolice powinny być dokładnie umyte przed kolejnymi aplikacjami Cica Care. Poszczególne paski Cica Care mogą być używane przez okres od 14 do 28 dni.