

# COREGA MAX Mocowanie+Osłona krem mocujący do protez miętowy 40 g

Cena: 15,30 PLN



## Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	40 g
Postać	-
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

## Opis produktu

**Opis COREGA MAX Mocowanie+Osłona krem mocujący do protez miętowy 40 g** Corega Power Max Mocowanie + Osłona to krem mocujący do protez zębowych. bez dodatku aromatów i barwników, o smaku miętowym. Tubka wyposażona jest w precyzyjny aplikator. Teksturowe opakowanie, wykonane z materiału z recyklingu, można poddać dalszemu recyklingowi. **Działanie:** Najsilniejsze mocowanie: najsilniejsza metoda mocowania protez wśród produktów linii Corega - odpowiednia do protez częściowych i całkowitych. Osłona: dokładnie osłania brzegi protezy, zapewniając ochronę przed przedostawaniem się drobinek pokarmu pod protezę. **Precyzyjna aplikacja:** precyzyjny aplikator umożliwiający równe nałożenie produktu pomaga nanieść jego odpowiednią ilość. **Jedzenie bez obaw:** mocowanie do 12 godzin. **Miętowy smak:** pomaga utrzymać uczucie świeżości przez długi czas. **Sposób użycia** Oczyszczyć i osuszyć protezę i wypłucz usta. Następnie postępuj zgodnie z ilustracjami na opakowaniu, by w odpowiedni sposób nanieść produkt na protezę częściową lub całkowitą. Włóż protezę i mocno ją dociśnij. Przygrzyź ją na kilka sekund i gotowe. Przed wyjęciem protezy zębowej przepłucz usta wodą, a następnie poruszaj protezę.