

COREGA MAX Mocowanie+Komfort krem mocujący do protez 40 g

Cena: 15,20 PLN



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	40 g
Postać	krem
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis COREGA POWER MAX Mocowanie+Komfort krem mocujący do protez 40 g Corega Power Max Mocowanie + Komfort to krem mocujący do protez zębowych, bez dodatku aromatów i sztucznych barwników, o smaku neutralnym. Tubka wyposażona jest w precyzyjny aplikator. Teksturowe opakowanie z recyklingu, które podlega dalszemu recyklingowi. **Działanie:** Najsilniejsze mocowanie: najsilniejsza metoda mocowania protez wśród produktów linii Corega - odpowiednia do protez częściowych i całkowitych. **Komfort:** redukuje nacisk protezy. **Precyzyjna aplikacja:** precyzyjny aplikator umożliwiający równe nałożenie produktu pomaga nanieść jego odpowiednią ilość. **Jedzenie bez obaw:** mocowanie do 12 godzin. **Sposób użycia** Oczyszczyć i osuszyć protezę i wypłucz usta. Następnie postępuj zgodnie z ilustracjami na opakowaniu, by w odpowiedni sposób nanieść produkt na protezę częściową lub całkowitą. Włóż protezę i mocno ją dociśnij. Przygryź ją na kilka sekund i gotowe. Przed wyjęciem protezy zębowej przepłucz usta wodą, a następnie poruszaj protezę.