

COREGA SUPER MOCNY Delikatnie miętowy krem mocujący do protez 40 g

Cena: 15,10 PLN



Opis słownikowy

Producent	HALEON POLAND SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny


COREGA
Delikatnie Miętowy

40
g

Opis produktu

Opis COREGA SUPER MOCNY Delikatnie miętowy krem mocujący do protez 40 g• Trójwymiarowe, stabilne i długotrwałe mocowanie protezy. • Zapobiega dostawaniu się drobinek żywności pod protezę. • Pomaga chronić dziąsła i ogranicza ryzyko ich podrażnienia. • Poprawia komfort noszenia i używania protezy. • Delikatnie miętowy smak. Delikatnie miętowy krem mocujący do protez zębowych Corega Super Mocny pozwala zapomnieć o dyskomforcie i problemach związanych z noszeniem protezy. Jego starannie opracowana formuła pomaga dokładnie mocować protezę i stabilizuje ją w trzech kierunkach: przód - tył, góra - dół i na boki. Silny, długotrwały efekt utrzymuje się aż do 12 godzin, a trójwymiarowe mocowanie protezy sprawia, że zwiększa się siła zgryzu, co oznacza, że możesz cieszyć się ulubionymi potrawami bez żadnych obaw. Krem nie zawiera cynku i jest odpowiedni zarówno do protez całkowitych, jak i częściowych. Dodatkowo Corega Super Mocny pomaga zapobiegać dostawaniu się resztek pokarmu pod płytkę protezy. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko podrażnień dziąseł, które mogą powodować drobinki jedzenia. Krem mocujący do protez zębowych ma również delikatnie miętowy smak, dzięki któremu możesz cieszyć się orzeźwieniem i świeżym oddechem. Corega Super Mocny to doskonały sposób, aby zachować pewność siebie przez cały dzień, nie tylko podczas posiłków! **Sposób użycia** Sposób aplikacji kremu: Protezę należy umyć i wysuszyć. Nanosić krótkie paski kremu na protezę, niezbyt blisko jej krawędzi. Wypluć jamę ustną przed założeniem protezy. Założyć protezę, docisnąć ją i przygryźć na kilka sekund. Sposób usuwania: Przepluć jamę ustną wodą. Wyjmować protezę powoli jednocześnie nią poruszając. Usunąć resztki kremu z protezy i jamy ustnej za pomocą ciepłej wody i miękkiej szczoteczki. Dokładnie oczyścić protezę stosując tabletki do czyszczenia protez Corega, a następnie opłukać wodą. **Skład** calcium/sodium PVM/MA copolymer, petrolatum, cellulose gum, paraffinum liquidum, propylparaben, aroma, CI 45430

Galeria

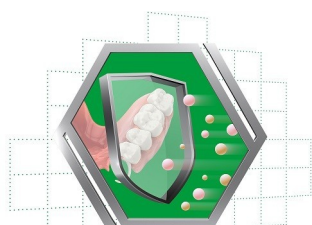

**ZAPOBIEGA DOSTAWANIU
SIĘ DROBINEK
POKARMÓW POD
PROTEZĄ ZĘBOWĄ**

PH PL 02 20 2020



**ZAPEWNIĄ TRWAŁOŚĆ
MOCOWANIA PROTEZY
PRZEZ CAŁY DZIEŃ**

PH PL 02 20 2020



**POSIADA PRZYJEMNY
DELIKATNIE MIĘTOWY
SMAK**

PH PL 02 20 2020