

COSMOS plastry na oparzenia 68 mm x 43 mm 8 sztuk

Cena: 17,65 PLN



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	8 szt.
Postać	-
Producent	PAUL HARTMANN POLSKA SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Właściwości Sterylne, jednorazowe plastry hydrożelowe dla ochrony i leczenia oparzeń. **Zastosowanie:** Do zaopatrywania oparzeń pierwszego oraz drugiego stopnia, w celu przyspieszenia procesu gojenia. **Sposób użycia** Schłodzić poparzone miejsce chłodną, bieżącą wodą. Następnie osuszyć okolicę rany czystym, najlepiej jałowym, kompresem. Najpierw zdjąć jedną część folii ochronnej z dolnej strony plastra. Przyłożyć odsłoniętą stronę plastra do rany, a następnie zdjąć pozostałą część folii ochronnej. Docisnąć plaster równomiernie, na brzegach dosyć mocno. Ostrożnie zdjąć górną folię ochronną. Plaster na oparzenia należy stosować do momentu całkowitego zagojenia się rany. Aby usunąć plaster należy delikatnie podważyć jego jeden róg, a następnie ostrożnie odkleić plaster. **Ważne** Charakterystyka: Opatrunek hydrożelowy; Przyspiesza proces gojenia; Redukuje ból; Zmniejsza ryzyko powstawania blizn; Stwarza wilgotne środowisko rany; Wodoodporny; Nie przykleja się do rany; Dzięki właściwościom wyściełającym żelu zapewnia perfekcyjną ochronę przed uciskiem; Chroni przed brudem i bakteriami; Zapakowany pojedynczo w sterylne opakowanie. **Składniki** Nośnik: folia PU; klej akrylowy; hydrożel **Producent** HARTMANN