

COSMOS plastry na pęcherze 3 rozmiary 6 sztuk DATA WAŻNOŚCI 30.05.2024



Cena: 10,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	6 szt.
Postać	plast.
Producent	PAUL HARTMANN POLSKA SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

OpisCOSMOS plastry na pęcherze 3 rozmiary 6 sztukNiesterylne, samoprzylepne, jednorazowe plastry hydrokoloidowe dla ochrony i leczenia pęcherzy na dłoniach i stopach.Zastosowanie:Do zaopatrywania pęcherzy.**Sposób użycia**Umyć dłonie i nakładać plaster wyłącznie na suchą, czystą i nienatłuszczoną skórę.Ściągnąć folię ochronną z plastra.Nakleić plaster na pęcherz. Lekkie przyciśnięcie i wymodelowanie brzegów plastra zapewnia jego optymalne przyleganie do skóry.Plaster należy usunąć dopiero wtedy, gdy zacznie się sam odklejać lub po 4 dniach od założenia.Aby wcześniej usunąć plaster na pęcherze, należy go na krótko zmoczyć ciepłą wodą.**Ważne**Charakterystyka:Wykonane z hydrokoloidu;Wspomagają gojenie pęcherzy;Zapewniają amortyzację;Wygodne w noszeniu;Zmniejszają ucisk i tarcie.**Skład**Nośnik: folia PU; klej akrylowy; hydrożel**Producent**HARTMANN