

DIAGNOSTIC P1 Plus Inhalator kompresorowy



Cena: 110,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	DIAGNOSIS S.A.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis Superwydajny kompresor tłokowy. Przeznaczony do pracy ciągłej. Kompaktowe rozmiary. Ekonomiczny. Akcesoria: maseczka dziecięca i dla dorosłych, widełce nosowe duże i małe, ustnik, filtr powietrza. Instrukcja użytkownika: Ustawi urządzenie na twardej, stabilnej powierzchni. Przed pierwszym użyciem, wyczyścić akcesoria zgodnie z zaleceniami z punktu „Czyszczenie urządzenia oraz akcesoriów”. Otworzyć obudowę przyciskając górną część rączki w kierunku: do siebie i do góry. Podłączyć nebulizator do urządzenia przy użyciu przewodu powietrza. Podłączyć jeden z akcesoriów (ustnik, widelec nosowy, maska) do nebulizatora tak jak pokazano na schemacie. Wlać lekarstwo do nebulizatora uważając, aby nie zamoczy urządzenia. Włożyć wtyczkę do gniazda (230V, 50Hz, zgodnie z opisem na spodzie urządzenia). Wdychać inhalowane lekarstwo. Po skończonej inhalacji wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazda. Umyć użyte części inhalatora.