

## DIATHER Diabolo Max Plaster silnie rozgrzewający, 1 szt.



Cena: 3,04 PLN

### Opis słownikowy

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| CE                 | 0197                     |
| Opakowanie         | 1szt.                    |
| Producent          | DIATHER SP. Z O.O. SP.K. |
| Rodzaj rejestracji | Wyrób medyczny           |

### Opis produktu

#### OpisDIATHER Diabolo Max Plaster silnie rozgrzewający

Diabolo MAX to medyczny plaster rozgrzewający o wymiarach 13x10 cm, który zapewnia ulgę w bólu nawet do 12 godzin. Jest przeznaczony do stosowania na bóle mięśniowe, reumatyczne, stawowe, nerwobóle oraz bóle menstruacyjne. Dzięki unikalnej formule, plaster skutecznie rozgrzewa i pomaga rozluźnić mięśnie, przynosząc długotrwałą ulgę w bólu.

#### Łagodzi bóle:

mięśniowe, reumatyczne, stawowe, nerwobóle menstruacyjne.

Działa aż do 12 godzin, zapewniając komfort i ulgę w bólu. Prosty w użyciu, łatwo przylega do bolącego miejsca.

#### Sposób użycia:

Otwórz opakowanie i usuń folię ochronną. Przyklej plaster na białą, przylegającą do bolesnego miejsca. Nie należy przyklejać plastra bezpośrednio na skórę. Efekt rozgrzewający plastra utrzymuje się do 12 godzin od użycia. Po przyklejeniu plastra temperatura będzie stopniowo wzrastać, maksymalnie do 65°C.

**Ostrzeżenia:** Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją użycia. Plaster wyłącznie do użytku zewnętrznego. Produkt jednorazowego użytku - nie podgrzewać ponownie, nie rozcinać plastra. Zużyć bezpośrednio po otwarciu opakowania. Nie wywierać ucisku na plaster poprzez kładzenie się, siadanie na nim lub ubieranie ciasnej odzieży.

#### Nie stosować wyrobu:

u dzieci poniżej 12 roku życia, bezpośrednio na skórę, jeżeli opakowanie wyrobu jest uszkodzone lub rozerwane, u osób, które nie są w stanie postępować zgodnie z wytycznymi instrukcji używania, szczególnie u dzieci i osób w podeszłym wieku, podczas snu, w miejscu

zmienionym chorobowo (np.rana) z innymi środkami lub metodami rozgrzewającymi (np. maści, koce) z innym plastrem, po terminie ważności wyrobu wskazanym na opakowaniu, w przypadku nadwrażliwości /uczulenia na którymkolwiek składnik produktu, dłużej niż 12 godzin w czasie jednej doby, należy skontaktować z lekarzem użycie w przypadku zapalenia stawów, chorób skóry, cukrzycy, chorób układu krążenia, stwardnienia rozsianego, choroby nowotworowej lub ciąży, przerwać stosowanie wyrobu w przypadku wystąpienia: podrażnienia, nadmiernego uczucia ciepła, pieczenia, obrzęku, dyskomfortu lub innych zmian skórnych w miejscu aplikacji plastra, produkty rozgrzewające mogą powodować poparzenia, w przypadku gdy podrażnienie skóry takie jak obrzęk, pęcherze, zaczerwienienie nie ustępują po krótkim czasie, należy skontaktować się z lekarzem, w przypadku połknięcia zawartości plastra lub kontaktu ze skórą lub oczyma należy przepłukać usta, skórę lub oczy dużą ilością wody i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem

**Przechowywanie:**Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł radioaktywnych. Chronić przed ciepłem oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci i zwierząt.

**Opakowanie:**Zawiera 1 plaster rozgrzewający.

Składniki:

Sproszkowane żelazo, węgiel aktywny, wermikulit, woda, sól.

Typ wyrobu medycznego wyrób medyczny lub wyrób medyczny do diagnostyki in-vitro

**Producent wyrobu medycznego** Henan Kangdi Medical Devices Co., Ltd.