

DUREX PLEASURE MIX Prezerwatywy mix 40 sztuk



Cena: 74,85 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	3 szt.
Postać	-
Producent	RECKITT BENCKISER POLAND S.A.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

OpisDUREX INTENSEPrezerwatywy prążkowane zaprojektowane z myślą o jej przyjemności.Prezerwatywy z wypustkami i prążkami.Są pokryte większą ilością lubrykantu wywołującego uczucie rozgrzania, chłodzenia i mrowienia.Standardowy rozmiar (szerokość nominalna 56 mm).DUREX PLEASUREMAXPrezerwatywy z wypustkami zaprojektowane z myślą o jej przyjemnościDodatkowa stymulacja dzięki powierzchni pokrytej prążkami i wypustkamiStandardowy rozmiar (szerokość nominalna 56 mm)**Sposób użycia**Rozewnij opakowanie od ząbkowanej krawędzi. Obchodź się ostrożnie z prezerwatywą, gdyż może zostać uszkodzona paznokciami lub ostrymi przedmiotami.Upewnij się, że zrolowana krawędź jest po zewnętrznej stronie. Ściśnij końcówkę i umieść prezerwatywę na czubku członka w stanie wzwodu.Rozwiń prezerwatywę na całej długości członka. Jeśli prezerwatywa nie chce się rozwinąć, może to oznaczać, że została założona odwrotnie, wyrzuć ją i użyj nowej. Zatrzymaj się i sprawdź, czy prezerwatywa nie ześlizguje się lub nie przylega zbyt ściśle do członka, ponieważ może to doprowadzić do jej uszkodzenia.Należy zdjąć prezerwatywę zaraz po wytrysku. Mocno przytrzymaj prezerwatywę u podstawy członka przed jego wyciągnięciem. Wrzuć folię i zużytą prezerwatywę do kosza. Nie wyrzucaj jej do toalety.