

FARMABOL Test T1 do wykrywania Trichomonas Vaginalis (rzęsistek pochwy) 1 sztuka

Cena: 60,90 PLN



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	INTEGRA DIAGNOSTIC SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Test diagnostyczny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis Test antygenowy T1 na *Trichomonas Vaginalis* to szybki test do samodzielnego wykonania, który jest zalecany w przypadku podejrzenia choroby dróg moczowo – płciowych nazywanej rzęsistkowicą. Test T1 wykrywa obecność pasożyta rzęsistka pochwowego, który wywołuje rzęsistkowicę. Domowy test przeznaczony jest do diagnostyki in vitro. Elementy składowe testu T1: torebka foliowa z kasetką testową T.V. – (jedna sztuka) oraz środek osuszający (1 sztuka) zakraplacz o pojemności 0,5 ml – jedna sztukamiseczek na moc – jedna sztukaprobówka na próbkę – zakrętka w kolorze fioletowym o pojemności 0,3 mlprobówka zawiera: 0,01% soli fizjologicznej Tris 0,05% azydku sodu 0,1% Tween-20 detergent (pH 7,5) instrukcja obsługi **Sposób użycia** 1. Otwórz zatyczkę z buforem. 2. Następnie należy odpipetować 0,5 ml próbki moczu przy użyciu zakraplacza – do probówki z buforem. 3. Zakręć dokładnie nakrętkę i obracaj probówkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara przez 5 sekund. Mocz oraz roztwór probówki (bufora) powinny być dobrze wymieszane. 4. Wyciągnij kasetkę testową T.V. Test z foliowego opakowania. 5. Ściągnij górną część fioletowej nakrętki z butelki z buforem (element bezbarwny). 6. Wlej cztery krople roztworu zmieszanego moczu i bufora w obszar w kasetce oznaczony jako „S”. Płyn zacznie przemieszczać się do góry. 7. Kasetkę testową należy pozostawić w temperaturze pokojowej, kładąc ją płasko na 15 minut. Po upływie 15 minut można odczytać wynik testu. Jak odczytać wynik testu? Wynik pozytywny – jeżeli widoczne są dwie linie – jedna kolorowa linia w strefie linii kontrolnej © oraz druga kolorowa linia widoczna w strefie testowej (T). Wynik pozytywny potwierdza obecność *Trichomonas Vaginalis*. Wynik negatywny – jeżeli w strefie linii kontrolnej © uwidoczniła się jedna kolorowa linia. W strefie testowej (T) nie pojawia się żadna linia. Wynik negatywny wyklucza obecność *Trichomonas Vaginalis*. Wynik nieprawidłowy – jeżeli nie pojawiła się linia kontrolna. Powodem tego może być niedostateczna zawartość próbki lub błędy popełnione w technice proceduralnej. W takim przypadku należy wykonać nowy test zgodnie z procedurą.