

## FIXSIN zestaw uzupełniający do płukania nosa i zatok 30 saszetek

Cena: 10,94 PLN



### Opis słownikowy

Producent	SOLINEA
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny

### Opis produktu

**Opis**FIXSIN zestaw uzupełniający do płukania nosa i zatok 30 saszetekFixsin, zestaw uzupełniający do płukania nosa i zatok, 30 saszetek.Wyrób medyczny,Do przygotowania roztworu izotonicznego,Dla dorosłych i dzieci powyżej 4 roku życia.Wyrób medyczny Fixsin, zestaw uzupełniający do płukania nosa i zatok:Zawiera czysty chlorek sodu (sól), do sporządzania roztworu do płukani nosa i zatok.Roztwór, używany z butelką z zestawu Fixsin, pomaga wypłukać i oczyścić nos i zatoki z wydzieliny, ograniczając zaleganie śluzu i czynników mogących przyczyniać się do powstania infekcji.**Sposób użycia**Wyrób medyczny Fixsin, zestaw uzupełniający do płukania nosa i zatok, należy używać zgodnie z instrukcją użycia i według wskazań lekarza.Należy używać wyłącznie oryginalnych, czystych elementów zestawu Fixsin.Wsyp zawartość saszetki (2,15 g proszku) do butelki.Napełnij butelkę przegotowaną wodą o temperaturze ciała, do poziomu oznaczonego linią 240 ml. W ten sposób otrzymasz roztwór izotoniczny.Dokładnie zakręć butelkę i potrząśnij, aż do całkowitego rozpuszczenia soli w wodzie.Przyłóż końcówkę butelki do otworu nosowego. Oddychaj przez usta!Płynnym ruchem ściśnij butelkę tak, aby roztwór ciągłym strumieniem dostał się do nosa i wypłynął drugim nozdrzem.Czynności powtórz przy drugim nozdrzu.Nie połykaj roztworu.Po zakończeniu płukania wydmuchaj nos.Wylej roztwór, który pozostał w butelce.Po każdym użyciu należy dokładnie umyć butelkę i nakrętkę.Wszystkie elementy zsetawu przechowuj czyste i suche.**Skład**100% chlorek sodu.Każda saszetka zawiera 2,15 g chlorku sodu.