

FUTURO opaska stabilizująca staw skokowy L na rzep



Cena: 39,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	3M POLAND SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis Zapewnia ochronę stawu przy osłabieniu, bólach i urazach kostki. Zastosowanie: Zastosowanie ogólne, chodzenie, bieganie, ćwiczenia fizyczne, trekking. Regulowany pasek pozwala na indywidualne dopasowanie. Podnosi i podpira sklepienie stopy. Swobodnie mieści się w butach. Materiał przepuszczający powietrze. Produkt zalecany przez nasz panel ekspertów w dziedzinie medycyny i inżynierii. Przeznaczenie: Zapewnia ochronę stawu przy zeszywnieniu, bólach i urazach kostki. Pasuje na lewą lub prawą stopę. Podnosi i podpira sklepienie stopy. Zapewnia kompresję i kojące ciepło. Regulowany pasek pozwala na indywidualne dopasowanie. Miękkie, oddychające materiały. Kiedy wykonujesz swoje ulubione aktywności, wzmocnij słabe stawy, sięgając po Futuro™ Opaskę stabilizującą staw skokowy. Opaska wykonana z mieszanki materiału uciskowego zapewnia umiarkowane podparcie kostki. Opaskę można łatwo, szybko i bezpiecznie owinąć wokół kostki, a regulowany pasek pozwala na dostosowanie stopnia ucisku. Pozostań w grze dzięki Futuro™ Opasce stabilizującej staw skokowy, która zapewni Ci wsparcie, jakiego szukasz. **Sposób użycia** Jak zakładać? 1. Wsuń stopę w elastyczną część opaski. Rysunek pokazuje instrukcję zakładania na lewą stopę (w celu założenia na prawą stopę, odwróć opaskę na drugą stronę). 2. Owiń pasek wokół kostki. 3. Zapnij rzep, dostosowując stopień napięcia paska. Postaraj się unikać umieszczania zapięcia na podbiciu stopy, bo może to spowodować dyskomfort podczas noszenia obuwia. **Ważne** UWAGA: Niniejszy produkt zawiera naturalny lateks kauczukowy, który może wywoływać reakcje uczuleniowe. W razie wystąpienia, utrzymania lub nasilenia bólu lub poczucia dyskomfortu zaprzestań stosowania produktu i skonsultuj się z lekarzem. **Producent** 3M Company, 2510 Conway Avenue, St. Paul, MN 55144 USA. **Nazwa upoważnionego przedstawiciela** 3M Deutschland GmbH, Health Care Business, Carl-Schurz-Str. 1, 41453 Neuss, Germany.