

Help4Skin Brodawki i Kurzajki, 50ml

Cena: 41,07 PLN



Opis słownikowy

CE	0546
Dawka	-
Opakowanie	50 ml
Postać	płyn
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis Help4Skin Brodawki i Kurzajki, 50ml

Help4Skin brodawki i kurzajki jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci powyżej 4 roku życia. Wyrób wystarcza na 12 aplikacji. Krioterapia opatentowaną metodą VERRUKILL® to bezpieczny, skuteczny i praktyczny sposób rozwiązania problemu brodawek i kurzajek w warunkach domowych. Polega na całkowitym wymrożeniu zmian w bardzo krótkim czasie, co uruchamia naturalny proces ich usuwania. Zamrożona brodawka powinna stopniowo zanikać lub odpaść po około 10 dniach, odsłaniając nowy, zdrowy naskórek. Jednorazowy zabieg wystarcza zazwyczaj do usunięcia problemu, z wyjątkiem przypadków szczególnie opornych brodawek lub kurzajek. W takich wypadkach konieczne będzie powtórzenie zabiegu po upływie dwóch tygodni.

Sposób użycia

BRODAWKI ZWYKŁE I KURZAJKI Małe: poniżej 2,5 mm: 10 sekund Średnie: od 2,5 mm do 5 mm: 15 sekund Duże: powyżej 5 mm: 20 sekund

BRODAWKI PODESZWOWE Wszystkie wielkości: od 20 do 40 sekund Maksymalny czas zabiegu w przypadku brodawek podeszgowych w różnych częściach stopy. W przypadku brodawek podeszgowych należy moczyć stopę w gorącej wodzie przez co najmniej 6 minut, a następnie usunąć zrogowaciałą warstwę brodawki za pomocą pumeksu, aby zoptymalizować efekty zabiegu z wykorzystaniem wyrobu Help4Skin Brodawki i kurzajki.

Składniki

Dimetyloeter i płynny propan.

Ważne

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 4 lat. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniami krążenia. W razie zaburzeń krążenia przed wykonaniem zabiegu należy poradzić się lekarza. Nie stosować w okresie ciąży lub karmienia piersią. Nie stosować na podrażnionej lub zakażonej skórze. W razie wrażliwości dotyczących leczonej części ciała przed wykonaniem zabiegu należy poradzić się lekarza. Nigdy nie stosować produktu na skórze z ciemnymi przebarwieniami, znamionami barwnikowymi, znamionami wrodzonymi lub nietypowymi, owłosionymi naroślami podobnymi do brodawek lub kurzajek. Nie stosować wyrobu w szczególnie wrażliwych obszarach skóry (twarz, podbródek, pachy, sutki, odbyt, narządy rozrodcze, usta, nos, wargi, uszy i okolice oczu). Nie stosować w skojarzeniu z innymi preparatami przeznaczonymi do usuwania brodawek.

Producent

DYSTRYBUTOR Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. 83-200 Starogard Gdański ul. Pelplińska 19 Polska