

HELP4SKIN gojenie ran żel 20 g



Cena: 16,70 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	20 g
Postać	żel
Producent	ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis

Żel hydrokoloidowy przyspieszający gojenie ran

20 g tuba

WYRÓB MEDYCZNY

Uniwersalny dla całej rodziny na różnego rodzaju rany i powierzchowne oparzenia.

Niezbędny w każdej domowej apteczce.

DO STOSOWANIA NA

Suche i wilgotne rany

Skaleczenia

Otarcia, zadrapania i pęknięcia skóry

Powierzchowe oparzenia

Help4Skin Gojenie Ran to nowoczesny opatrunek w formie żelu hydrokoloïdowego, **reguluje prawidłowy poziom wilgotności rany i tworzy optymalne środowisko gojenia**. Dzięki Help4Skin rany **goją się lepiej, 2x szybciej i mniej bolą**. 1

1
Przyspiesza gojenie ran

2
Pomaga zapobiec infekcji

3
Natychmiast zmniejsza ból

4
Zmniejsza ryzyko powstawania blizn

NA RÓŻNE RANYSUCHE I WILGOTNE

Help4Skin Gojenie Ran reguluje mikrośrodowisko rany w ranach suchych nawilża ranę i zapobiega nadmiernej utracie wody, w ranach

wilgotnych pochłania nadmiar płynu.

SZYBKA ULGA

Help4skin Gojenie Ran łagodzi skutki urazów m.in.: skaleczeń, zadrapań, otarć, pęknięć skóry oraz oparzeń (np. słonecznych, termicznych).

OCHRONA PRZED INFEKCJĄ

Po nałożeniu na ranę, żel tworzy barierę ochronną oraz niekorzystne dla rozwoju bakterii kwaśne środowisko w ranie, dzięki czemu pomaga zapobiec infekcji.

SPOSÓB UŻYCIA

ZAMKNIĘTE RANY:

oczyścić i zdezynfekować leczony obszar nałożyć preparat na ranę, nie dotykając jej końcówką aplikatora w razie potrzeby założyć bandaż lub plaster

OTWARTE RANY:

oczyścić i zdezynfekować ranę dokładnie i delikatnie osuszyć sterylną gazą nałożyć grubą warstwę preparatu (0.5-0.75 cm) na ranę, nie dotykając jej końcówką aplikatora, założyć plaster lub bandaż zmieniać żel i plaster lub bandaż przynajmniej raz dziennie zmniejszyć ilość stosowanego preparatu, gdy na ranie pojawi się strup

Uwaga! W przypadku oparzeń należy najpierw przemyć wodą, następnie przejść do następujących punktów.

SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA W BADANIACH

Znaczenie wilgotnego środowiska w gojeniu się ran

„Badania wielokrotnie wykazały, że jeśli na miejsce zranienia zostanie nałożony wilgotny opatrunek i zostanie zapewniona wilgoć przez cały czas gojenia się skóry, to sam proces gojenia przebiega znacznie szybciej i gojenie odbywać się będzie bez wytworzenia blizny.”¹

Wilgotne środowisko leczenia rany sprzyja naturalnym procesom oczyszczania rany, regeneracji uszkodzonych wcześniej tkanek, a ponadto zmniejsza dolegliwości bólowe. Dzięki temu **rana goi się średnio o ok. 50% szybciej**. Obniżając pH, podnosimy kwasowość środowiska rany, a to **hamuje namnażanie się bakterii**.¹

W tym celu opracowano inteligentne hydrożele, które **mogą być nakładane bezpośrednio na zranioną skórę**. Żele takie zapewniają nie tylko wilgoć, ale wchłaniają również płyn, który wydostaje się ze zranionej skóry, np. po oparzeniu.¹

1. Źródło: „Znaczenie wilgotnego środowiska ran w gojeniu ran”, dr n. med. Leszek Krzesiak. Farmacja Praktyczna, numer 03 04.2019.

WYROBY MEDYCZNE

POZNAJ SERIĘ PRODUKTÓW

GOJENIE RAN

Żel hydrokoloidowy przyspieszający gojenie ran

BRODAWKI I KURZAJKI

Preparat do usuwania brodawek i kurzajek metodą krioterapii

GOJENIE RAN

Żel hydrokoloidowy przyspieszający gojenie ran

BRODAWKI I KURZAJKI

Preparat do usuwania brodawek i kurzajek metodą krioterapii

GOJENIE RAN

Żel hydrokoloidowy przyspieszający gojenie ran

GOJENIE PĘKNIĘĆ SKÓRY

Plaster w żelu wspomagający gojenie

GOJENIE RAN

Żel hydrokoloidowy przyspieszający gojenie ran

GOJENIE PĘKNIĘĆ SKÓRY

Plaster w żelu wspomagający gojenie

GOJENIE RAN

Żel hydrokoloidowy przyspieszający gojenie ran

GOJENIE PĘKNIĘĆ SKÓRY

Plaster w żelu wspomagający gojenie

GOJENIE RAN

Żel hydrokoloidowy przyspieszający gojenie ran

BRODAWKI I KURZAJKI

Preparat do usuwania brodawek i kurzajek metodą krioterapii

GOJENIE RAN

Żel hydrokoloidowy przyspieszający gojenie ran

GOJENIE PĘKNIĘĆ SKÓRY

Plaster w żelu wspomagający gojenie

BRODAWKI I KURZAJKI

Preparat do usuwania brodawek i kurzajek metodą krioterapii

GOJENIE RAN

Żel hydrokoloidowy przyspieszający gojenie ran

POBIERZ PEŁNĄ ULOTKĘ

Moc gojenia na RANY i OPARZENIA

4,7/5

Średnia ocena użytkowników Ceneo.pl*

*w oparciu o dane z serwisu Ceneo.pl, średnia z 126 opinii użytkowników z dnia 31.05.2023

Pozostałe informacje o produkcie

OPIS

Help4Skin Gojenie Ran to uniwersalny dla całej rodziny wyrób medyczny na różnego rodzaju rany i powierzchowne oparzenia. Niezbędny w każdej domowej apteczce. Do stosowania na:

Rany (suche i sączące się) Skaleczenia Otarcia, zadrapania i pęknięcia skóry Powierzchowne oparzenia

Help4Skin Gojenie Ran można stosować u dzieci powyżej 2 lat. Help4Skin Gojenie Ran występuje w pojemności 20g i 75g.

DZIAŁANIE

Help4Skin Gojenie Ran to nowoczesny opatrunek w formie żelu hydrokoloidowego, który **reguluje prawidłowy poziom wilgotności rany i tworzy optymalne środowisko gojenia.**

Help4Skin Gojenie Ran ma działanie **4w1**:

Przyspiesza gojenie ran i oparzeń Pomaga zapobiec infekcji Natychmiast zmniejsza ból Zmniejsza ryzyko powstawania blizn

Dzięki Help4Skin rany i oparzenia **goją się lepiej, 2x szybciej i mniej boją.**¹

NA RÓŻNE RANY SUCHE I WILGOTNE Help4Skin Gojenie Ran reguluje mikrośrodowisko rany w ranach suchych nawilża ranę i zapobiega nadmiernej utracie wody, w ranach wilgotnych pochłania nadmiar płynu.

SZYBKA ULGA Help4skin Gojenie Ran łagodzi skutki urazów m.in.: skaleczeń, zadrapań, otarć, pęknięć skóry oraz oparzeń (np. słonecznych, termicznych).

OCHRONA PRZED INFEKCJĄ Po nałożeniu na ranę, żel tworzy barierę ochronną oraz kwaśne środowisko w ranie niekorzystne dla rozwoju bakterii, dzięki czemu pomaga zapobiec infekcji.¹

SPOSÓB UŻYCIA

Zamknięte rany:

oczyszczyć i zdezynfekować leczony obszar, nałożyć preparat na ranę, nie dotykając jej końcówką aplikatora, w razie potrzeby założyć bandaż lub plaster.

Otwarte rany:

oczyszczyć i zdezynfekować ranę, dokładnie i delikatnie osuszyć sterylną gazą, nałożyć grubą warstwę preparatu (0.5-0.75 cm) na ranę, nie dotykając jej końcówką aplikatora, założyć plaster lub bandaż, zmieniać żel i plaster lub bandaż przynajmniej raz dziennie, zmniejszyć ilość stosowanego preparatu, gdy na ranie pojawi się strup.

Uwaga! W przypadku oparzeń należy najpierw przemyć wodą, następnie przejść do następnych punktów.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nie używać w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników. W bardzo rzadkich przypadkach zgłaszano wystąpienie podrażnienia skóry. W przypadku wystąpienia podrażnienia lub reakcji alergicznej należy natychmiast przerwać stosowanie. Nie stosować Help4Skin Gojenie ran na twarz, oczy, powieki oraz błony śluzowe. Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

SKŁAD

kwaśny koloidalny karbomer, karnozyna, woda, benzoesan sodu, sorbinian potasu. **Nie zawiera parabenów**

WAŻNOŚĆ

3 lata, data ważności umieszczona na opakowaniu

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

PRODUCENT Oystershell NV

PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. EML/2023/558

Właściwości Help4Skin gojenie ran hydrokoloidowy żel bez parabenów wskazany do miejscowej pielęgnacji suchych i wilgotnych ran. Help4Skin gojenie ran to wyrób medyczny, który w sposób pośredni przyspiesza gojenie ran poprzez regulację ich mikrośrodowiska. Help4Skin gojenie ran zawiera kwas karbomer stabilizowany karnozyną, podstawowym peptydem występującym naturalnie w skórze. W przypadku ran suchych takich jak otarcia i rany chirurgiczne ma działanie okluzyjne: hamuje parowanie i zmniejsza utratę płynu przez naskórek. Karnozyna buforuje kwaśne polimery, dzięki czemu działa jako przeciwutleniacz. Karbomer pochłania nadmiar płynu z wilgotnych, sączących się ran oraz schładza i zmiękcza miejsce kontaktu z plastrem/bandażem. Nie przywiera do rany. **Sposób użycia** Stosować bezpośrednio na rany. **Ważne** Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. **Przechowywanie:** Przechowywać w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci. **Składniki** Kwaśny koloidalny karbomer, karnozyna, woda, benzoesan sodu, sorbinian potasu. **Producent** Polpharma S.A. Starogard Gdański

Galeria

help4skin GOJENIE RAN

HYDROKOLOIDOWY ŻEL
NA RANY, SKALECZENIA
I POWIERZCHOWNE OPARZENIA



MEGAŚNIE
ODWILGNIWA I
NATYCHMIAST
POWYŻSZA
POZIOMY
WILGOTNOŚCI
SKÓRY

help4skin GOJENIE RAN

DO STOSOWANIA NA

- Suche i wilgotne rany
- Skaleczenia
- Otarcia, zadrapania i pęknięcia skóry
- Powierzchnowe oparzenia

Dzięki Help4Skin rany goją się lepiej, 2x szybciej i mniej boją.*

* Środki „Znaczenie wilgotnego środowiska ran w gojeniu ran”, Dr n. med. Leszek Kozłowski, Farmacja Praktyczna, numer 03-04/2015.

help4skin GOJENIE RAN

DZIAŁANIE 4 W JEDNYM

- Pośrednio przyspiesza gojenie ran
- Pomaga zapobiec infekcji
- Natychmiast zmniejsza ból
- Zmniejsza ryzyko powstawania blizn

help4skin GOJENIE RAN

INTELIGENTNY ŻEL HYDROKOLOIDOWY
REGULUJE PRAWIDŁOWY POZIOM
WILGOTNOŚCI RANY I TWORZY
OPTYMALNE ŚRODOWISKO GOJENIA.



Na różne rany -
suche i wilgotne

Szybka ulga

Ochrona przed
infekcją

help4skin GOJENIE RAN

ŚREDNIA OCENA
UŻYTKOWNIKÓW CENEO.PL*

★★★★★
4,7/5

- Skuteczność
- Szybkość działania
- Wydajność

*Wzrostki z 98 opinii dotychczas w serwisie Ceneo.pl, stan na dzień 28.05.2022.
Źródło: <https://www.ceneo.pl/1703944889420-reviews>

help4skin GOJENIE RAN

POZNAJ SERIĘ PRODUKTÓW

GOJENIE PĘKNIĘĆ SKÓRY

GOJENIE OPARZEŃ



HELD/2023/558