

Heltiso Dent Nić dentystyczna miętowa, nylonowa, woskowana, 50m



Cena: 7,60 PLN

Opis słownikowy

Producent MEDICINAE SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu

OpisHeltiso Dent Nić dentystyczna miętowa, nylonowa, woskowana, 50m

Woskowana, nylonowa nić dentystyczna o miętowym zapachu. Stosowana do usuwania osadu nazębnego oraz resztek jedzenia z przestrzeni międzyzębowej.

Pomaga w utrzymaniu prawidłowej higieny jamy ustnej. Usuwa płytkę bakteryjną, przyczyniając się do zapobiegania powstawaniu próchnicy zębów. Ogranicza powstawanie kamienia nazębnego. Idealnie sprawdza się w czyszczeniu aparatów ortodontycznych, mostów i przestrzeni międzyzębowych. Wydajność zapewniona przez nić o długości 50 m.

Sposób użycia:

Oderwać około 45 cm nitki. Nić nawlec na środkowe lub wskazujące palce obu dłoni, przytrzymując ją sobie kciukami. Na jednym palcu zostawić niewielki kawałek nici (aby później nawlekać na nim zużytą nić), a na drugim pozostałą część (z której należy odwijać nowe odcinki nici). Pomiędzy palcami zostawić około 4 cm napiętej nici. Delikatnie wprowadzić nitkę do przestrzeni między zębowej aż do wyczucia pierwszego oporu. Wykonywać łagodny ruch nicią w górę i w dół. Na palec, gdzie zostawiono niewielki kawałek nici, nawlec zużytą jej część, a z drugiego palca odwijać nowy odcinek nici, aby wyczyścić kolejny obszar między zębami. Czynność powtórzyć aż do wykorzystania oderwanej nici. Zużytą nić wyrzucić.

Podmiot odpowiedzialny:Medicinea Sp. z o.o.,