

## HELTISO IRISIN Zestaw uzupełniający do płukania nosa i zatok 30 saszetek



Cena: 9,90 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	30 sasz.
Postać	-
Producent	ASA SP. Z O.O. GŁUBCZYCE
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

### Opis produktu

**Opis** Roztwór izotoniczny do płukania nosa i zatok wskazany jest do stosowania w: zapaleniu zatok przynosowych różnej etiologii, nieżytu nosa współtowarzyszącemu alergii lub infekcji, przed i po zabiegach chirurgicznych nosa i zatok, celu utrzymania higieny nosa, celu płukania jamy nosa i nawilżenia śluzówki nosa, celu rozluźnienia śluzu i usuwaniu wszystkich rodzajów wydzielin i zanieczyszczeń z jamy nosa, celu porady działania systemu obronnego układu oddechowego. Roztwór hipertoniczny dzięki właściwościom osmotycznym na błonę śluzową, zmniejsza obrzęk śluzówki w nieżycie nosa współtowarzyszącym alergii lub infekcji, zapaleniu zatok. **Sposób użycia** Wyrób może być stosowany 1-2 razy dziennie lub zgodnie z zaleceniami lekarza. Przygotowanie roztworu izotonicznego: do butelki wsypać 1 saszetkę i dopełnić zawartość butelki przegotowaną, ostudzoną wodą do umieszczonej na butelce kreski oznaczającej 240ml. Przygotowanie roztworu hipertonicznego: do butelki wsypać 2 saszetki i dopełnić zawartość butelki przegotowaną, ostudzoną wodą do umieszczonej na butelce kreski oznaczającej 240ml. **Skład** Chlorek sodu (Ph. Eur.).