

HELTISO Termofor 2 L bez pokrowca



Cena: 16,80 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	HELBO SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

OpisZalecany do łagodzenia bóli mięśniowych, rozluźnienia i łagodzenia stresu.Łagodzenie bóli mięśniowych, rozluźnienie ciała, relaksacja.**Sposób użycia**Stosowanie: Napętnić termofor ciepłą wodą do ok. 2/3 objętości trzymając go w pozycji pionowej. W trakcie tej czynności unikać rozpryskiwania wody. Po napętnieniu usunąć nadmiar powietrza poprzez delikatne przechylenie termoforu, tak aby przy otworze wlewowym pojawiła się woda. Następnie szczelnie zakręcić korek i upewnić się, że woda nie wycieka.Przechowywanie: Przechowywać otwarty termofor w ciepłym i suchym miejscu z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych.**Skład**Naturalna guma.