

## HEVIRAN COMFORT Plastry na opryszczkę 15 sztuk



### Opis produktu

#### Opis

Heviran® Comfort

plastry na opryszczkę

15 przezroczystych plastrów na opryszczkę

SKUTECZNOŚĆ do 12 godzin

Heviran® Comfort plastry na opryszczkę to szybki i wygodny sposób na zmniejszenie widoczności oraz złagodzenie dolegliwości związanych z opryszczką (tj. swędzenie, mrowienie).

Cena: 25,95 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	15 szt.
Postać	plaster
Producent	ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

Wspomagają gojenie

Zmniejszają ryzyko infekcji

Łagodzą swędzenie i mrowienie

Chronią przed powstawaniem blizn

Heviran® Comfort  
plastry na opryszczkę

Heviran® Comfort plastry na opryszczkę zawierają kwas hialuronowy, który dzięki odpowiedniemu nawilżeniu skóry, łagodzi uczucie swędzenia i mrowienia oraz chroni przed powstaniem blizn.

Heviran® Comfort plastry na opryszczkę działają jak ochronna tarcza: **Zmniejszają ryzyko infekcji** tworząc barierę ochronną przed czynnikami zewnętrznymi **Chronią przed przeniesieniem wirusa** na inne miejsca na skórze lub zakażeniem innych osób **Umożliwiają nałożenie makijażu**

Jak stosować?

Heviran® Comfort plastry na opryszczkę mogą być stosowane na każdym etapie rozwoju opryszczki, a najlepiej przy pierwszych objawach. Plaster zawiera wygodny aplikator (podłużny "ogonek"), który umożliwia higieniczne, bezdotykowe i sprawne nałożenie plastra na opryszczkę, co pozwala uniknąć zakażenia innych części ciała lub innych osób.

Otworzyć saszetkę

Wyjąć plaster trzymając tylko za podłużny "ogonek"

Przykleić plaster na opryszczkę

Delikatnie odkleić "ogonek"

Usunąć niebieską folię ochronną, dzięki temu na ustach pozostanie niewidoczny plaster

O opryszczce<sup>1,2</sup>

Opryszczkę pospolitą wywołuje wirus HSV. Szacuje się, że jego nosicielem jest 90% społeczeństwa. Wirus, który raz dostał się

do organizmu pozostaje w nim w stanie uśpiania w komórkach nerwowych zwoju trójdzielnego (HSV1) i zwoju lędźwiowo-krzyżowego (HSV2). Na skutek pewnych czynników wirus może się uaktywnić i wywołać opryszczkę.

Co może wywołać opryszczkę:

silne osłabienie organizmu

miesiączka

gorączka

wyziębienie

przemęczenie

stres

nadmierna ekspozycja na słońce (UV)

leczenie i zabiegi stomatologiczne

Tuż przed pojawieniem się opryszczki pacjent odczuwa objawy zwiastujące jej wystąpienie – tzw. objawy prodromalne:

mrowienie pieczenie świąd zaczerwienienie napięcie skóry

Heviran® Comfort

#### **Plastry na opryszczkę**

można stosować na każdym etapie rozwoju opryszczki, a najlepiej przy pierwszych objawach. Heviran® Comfort Plastry na opryszczkę

Tworzą niewidoczną warstwę ochronną Wspomaga gojenie Zmniejszają ryzyko infekcji Łagodzą swędzenie i mrowienie Chroni przed powstawaniem blizn Zapewniają skuteczność do 12 godzin

Poznaj inne produkty marki Heviran® Comfort

LEK OTC\*

**Heviran Comfort Max** Aciclovirum 400 mg x 30 tabletek Zapobiega nawrotom opryszczki

LEK OTC\*

**Heviran Comfort** Aciclovirum 200 mg x 30 tabletek Leczenie nawrotowej opryszczki warg i twarzy

1. Lesiak A i in. Kompleksowe leczenie opryszczki wargowej. Forum Dermatologicum 2017; 3(4): 147–151. 2. Zaborowski P i in. Zakażenie wirusem opryszczki zwykłej. Medycyna Praktyczna. <https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.18.1.8>. Data dostępu: 01.12.202

\* Dotyczy leków Heviran® Comfort i Heviran® Comfort MAX:

**Heviran Comfort. Skład i postać:** Heviran Comfort. Każda tabletkę zawiera 200 mg acyklowiru. Tabletkę barwy białej, okrągłe, obustronnie wypukłe. **Wskazania:** Leczenie nawrotowej opryszczki warg i twarzy wywołanej przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex) u dorosłych. Produkt leczniczy może być stosowany jedynie u pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na substancję czynną, walacyklowir lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. **Podmiot odpowiedzialny:** Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Lek wydawany bez recepty. ChPL: 07.05.2020 r.

**Heviran Comfort MAX. Skład postać:** 1 tabletkę zawiera 400 mg acyklowiru. Tabletkę barwy białej, okrągłe, obustronnie wypukłe. **Wskazania:** Zapobieganie nawrotom opryszczki pospolitej (Herpes simplex virus) u dorosłych pacjentów z prawidłową odpornością. Produkt leczniczy może być stosowany jedynie u pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na substancję czynną, walacyklowir lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. **Podmiot odpowiedzialny:** Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu leku nr: 18428 wydane przez MZ; [www.polpharma.pl](http://www.polpharma.pl). Lek wydawany bez recepty. ChPL: 2021.03.04.

\* Dotyczy leków Heviran® Comfort i Heviran® Comfort MAX




To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

PRODUCENT Eurosirel S.p.A

PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

## Galeria

### Heviran<sup>®</sup> comfort plastry na opryszczkę


-  Wspomagają gojenie
-  Zmniejszają ryzyko infekcji
-  Łagodzą swędzenie i mrowienie
-  Chronią przed powstawaniem blizn

### Heviran<sup>®</sup> comfort plastry na opryszczkę

-  Wygodne w aplikacji
-  Przezroczyste
-  Trwate – do 12 godzin

### Heviran<sup>®</sup> comfort plastry na opryszczkę

**Heviran<sup>®</sup> Comfort Plastry**  
można stosować na każdym etapie rozwoju  
opryszczki, a najlepiej przy pierwszych objawach.

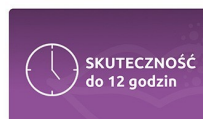

### Poznaj inne produkty marki Heviran<sup>®</sup> Comfort

Leczenie nawrotowej  
opryszczki warg i twarzy

Zapobieganie  
nawrotom opryszczki



Heviran Comfort Aciclovirum  
200 mg x 25 tabletek

Heviran Comfort Max  
Aciclovirum 400 mg x 30 tabletek

HEVC/164/06-2022