

## HYDREX test ciążowy płytkowy, 1 szt.



Cena: 2,99 PLN

### Opis słownikowy

CE	1434
Opakowanie	1 szt.
Producent	HYDREX
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny

### Opis produktu

#### OpisHYDREX test ciążowy płytkowy Przygotowanie i stosowanie

**Wykonanie badania**1. Końcówkę plastikowej pipetki zanurz w badanym moczu. Ściskając górną część pipetki, napełnij ją moczem.2. Odmierz powoli 3 pełne krople moczu do owalnego okienka na płytce testowej.3. Wynik testu odczytaj po czasie 2 do 5 minut na płytce testowej. Jeśli nie pojawi się żadna barwna linia, odczekaj jeszcze minutę. Nie bierz pod uwagę wyniku otrzymanego po czasie dłuższym niż 10 minut.

**Interpretacja wyników testu****Wynik ujemny (brak ciąży)**Pojawia się prążek kontrolny C, prążek testowy T nie pojawia się. Taki wynik testu wskazuje, że prawdopodobnie nie jesteś w ciąży.**Wynik dodatni (ciąża)**Pojawiają się dwa wyraźne prążki: w strefie testowej T i kontrolnej C. Intensywność barwy prążka T jest taka sama, słabsza lub silniejsza niż intensywność barwy prążka C. Taki wynik wskazuje, że prawdopodobnie jesteś w ciąży.**Wynik nieważny**W przypadku, gdy nie pojawia się żaden prążek lub pojawia się tylko prążek testowy T, wynik testu jest nieważny i należy powtórzyć badanie używając nowego testu ciążowego, ściśle przestrzegając instrukcji użycia.

#### Zawartość opakowania

- 1 foliowa torebka zawierająca: 1 test, 1 plastikową pipetkę oraz 1 środek pochłaniający wilgoć- instrukcja wykonania testu

Producent: Hydrex