

## IMUTEST ALERGIA jajo 1 sztuka

Cena: 71,10 PLN



### Opis słownikowy

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Dawka              | -                        |
| Opakowanie         | 1 szt.                   |
| Postać             | -                        |
| Producent          | DIATHER SP. Z O.O. SP.K. |
| Rodzaj rejestracji | Wyrób medyczny inny      |
| Substancja czynna  | -                        |

### Opis produktu

**Opis**IMUTEST ALERGIA jajo 1 sztukaIMUTEST ALERGIA jajo (1 test) domowy, kasetkowy test do wykrywania swoistych przeciwciał klasy IgE, skierowanych przeciwko alergenom jaja – białkom: owomukoidowi, owoalbumine, owotransferynie i lizozymowi.ZASTOSOWANIEIMUTEST ALERGIA jajo to prosty, bezpieczny i dokładny sposób na wykrycie we krwi wysokiego poziomu przeciwciał zwanych immunoglobulinami E (IgE). Wysoki poziom swoistych przeciwciał klasy IgE związany jest ze zwiększoną podatnością na alergię, np. na alergię na białka jaja. Niewielka próbka krwi pobierana jest w sposób higieniczny i bezbolesny.Alergia na białko jaja występuje u około 2% dzieci, ale może również wystąpić u dorosłych. Uzyskane za pomocą testu wyniki są porównywalne z wynikami uzyskanymi za pomocą profesjonalnych metod diagnostycznych (ImmunoCAP). Czulość testu względem referencyjnej metody laboratoryjnej wynosi 100% , swoistość również 100%.Test można wykonać o każde porze roku. W czasie wykonywania testu nie muszą występować objawy alergii. Przed użyciem produktu nie ma konieczności odstawienia żadnych leków w tym przeciwalergicznym. Za pomocą testu można wykonać badanie u pacjentów w każdym wieku, w tym u małych dzieci. IMUTEST ALERGIA jajo zapewnia szybkie wyniki z niewielkiej próbki krwi z nakłucia opuszki palca lub pięty (małe dzieci).WSKAZANIA DO WYKONANIA IMUTEST ALERGIA mleko:alergiczne objawy skórne (pokrzywka, atopowe zapalenie skóry, wysypka)objawy ze strony układu pokarmowego (nudności, bóle brzucha, biegunka, wymioty)zespół alergii jamy ustnejból głowykichanie, nieżyt nosaczęste infekcje układu oddechowego zapalenie spojówek**Sposób użycia**1. Otrzymanie próbki krwi za pomocą sterylnej nakłuwacza dołączonego do zestawu2. Pobranie próbki krwi za pomocą kapilary dołączonej do zestawu3. Wprowadzenie pobranej próbki krwi do oznaczonego mniejszego okienka w kasecie testowej4. Odczekanie 15 minut i odciągnięcie niebieskiego suwaka w kasecie testowej**Skład**ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA1 saszetka z testem kasetkowym1 sterylnej nakłuwacz1 kapilara1 odczynnikinstrukcja użycia