

## IMUTEST ALERGIA kot 1 sztuka

Cena: 72,90 PLN



### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	DIATHER SP. Z O.O. SP.K.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

### Opis produktu

**Opis** IMUTEST ALERGIA kot 1 sztuka IMUTEST ALERGIA kot – test wykrywający nadwrażliwość na główny alergen kota – uteroglobulinę (sekretoglobulinę) oznaczony symbolem Fel d1. Alergen obecny jest w wydzielinie gruczołów ślinowych i łojowych, włosach, sierści i skórze. Alergia na główny alergen kota – Fel d1 jest znaczącą przyczyną rozwinięcia się w przyszłości astmy. Uzyskane za pomocą testu wyniki są porównywalne z wynikami uzyskanymi za pomocą profesjonalnych metod diagnostycznych (ImmunoCAP). Czułość testu względem referencyjnej metody laboratoryjnej wynosi 97% , swoistość – 100%. Test można wykonać o każde porze roku. W czasie wykonywania testu nie muszą występować objawy alergii. Przed użyciem produktu nie ma konieczności odstawienia żadnych leków w tym przeciwalergicznym. Za pomocą testu można wykonać badanie u pacjentów w każdym wieku, w tym u małych dzieci. IMUTEST ALERGIA kot zapewnia szybkie wyniki z niewielkiej próbki krwi z nakłucia opuszki palca lub pięty (małe dzieci). **WSKAZANIA DO WYKONANIA** IMUTEST ALERGIA kot: objawy astmatyczne (świszczący oddech, kaszel, spastyczność oskrzeli) kichanie, nieżyt nosa swędzące, łzawiące i opuchnięte oczy reakcje anafilaktycznoalergiczne objawy skórne (pokrzywka, świąd, rumień) **Sposób użycia** 1. Otrzymanie próbki krwi za pomocą sterylnej nakłuwacza dołączonego do zestawu 2. Pobranie próbki krwi za pomocą kapilary dołączonej do zestawu 3. Wprowadzenie pobranej próbki krwi do oznaczonego mniejszego okienka w kasecie testowej 4. Odczekanie 15 minut i odcignięcie niebieskiego suwaka w kasecie testowej **Skład** ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 1 saszetka z testem kasetkowym 1 sterylnej nakłuwacza 1 kapilara 1 odczynnik instrukcja użycia