

INTEGRA Multi test do wykrywania 6 narkotyków w moczu (6w1)



Cena: 16,19 PLN

Opis słownikowy

Producent INTEGRA DIAGNOISTIC SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Opis Opisany produkt to pojedynczy, płaski, wieloczynnikowy test zanurzeniowy, stosowany w celu jakościowego wykrywania obecności narkotyków w moczu. Proces testowania polega na zanurzeniu panelu testowego w próbce moczu. Ten immunochromatograficzny test pozwala na identyfikację różnych substancji psychoaktywnych, takich jak amfetamina (AMP), kokaina (COC), marihuana (THC), ecstasy (MDMA), opiaty (OPI) oraz morfina (MOP). **Sposób użycia** Wyjąć panel testowy z opakowania foliowego. Zdjąć obudowę z panelu testowego. Trzymając panel pionowo, zanurzyć końcówki pasków testowych w próbce moczu przez około 10-15 sekund. Upewnić się, że poziom moczu sięga co najmniej do linii falujących oznaczonych na paskach, ale nie dotyka panelu testowego. Po wyjęciu panelu z paskami testowymi z próbki, założyć ponownie obudowę na panel i umieścić go na czystej i suchej powierzchni. Odczekać 5 minut przed odczytem wyników. Nie interpretować wyników po upływie 10 minut.