

# JOBST MATERNITY OPAQUE rajstopy uciskowe CCL1 karmelowy, rozmiar 6 ZP KRÓTKA DATA 31.12.2024

Cena: 136,99 PLN



## Opis słownikowy

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Opakowanie         | 1 komplet           |
| Producent          | JOBST               |
| Rodzaj rejestracji | Wyrób medyczny inny |

## Opis produktu

**Opis**PRODUKT Z KRÓTSZĄ DATĄ WAŻNOŚCI. DATA WAŻNOŚCI 31.12.2024 JOBST® MATERNITY OPAQUE - Rajstopy uciskowe dla kobiet w ciąży

Rajstopy uciskowe JOBST® Maternity Opaque to produkty uciskowe dla kobiet w ciąży. Posiadają wstawkę SoftFlex z siatkowym wzorem, która **dopasowuje się do rosnącego brzucha i podtrzymuje go**. Amortyzowana podeszwa ze strefą wentylującą przepuszcza powietrze w stopach, co zwiększa komfort noszenia. Rajstopy są miękkie w dotyku dzięki delikatnym włóknom. Oddychająca struktura materiału odprowadzająca wilgoć zapewnia suchość skóry przez cały dzień.

Zmiany hormonalne w trakcie ciąży powodują wzrost objętości krwi, podwyższenie ciśnienia i rozszerzenie naczyń krwionośnych. Wspierają one rozwój dziecka, ale jednocześnie mogą powodować bóle nóg i obrzęki kostek oraz zwiększać ryzyko wystąpienia żylaków. Dodatkowy ciężar wpływa także na stan więzadeł i zmęczenie mięśni.

**Rajstopy uciskowe JOBST zwiększają ciśnienie krwi w tkance podskórnej, dzięki czemu pomagają zmniejszyć obrzęk nóg.** Wspierają prawidłowe funkcjonowanie żył, co zapobiega zaleganiu krwi i puchnięciu nóg, a także pomagają łagodzić zawroty głowy i nudności. Zmniejszają również wystąpienie problemów żylnych w przyszłości.

Rajstopy uciskowe JOBST® Maternity Opaque - dla kogo?

**Stworzone dla kobiet z lekkimi i średnimi problemami żylnymi:** zmęczonymi i opuchniętymi nogami, pajęczkami, żylakami i przewlekłą chorobą żylną oraz w celach **profilaktycznych** (w zależności od klasy ucisku).

Cechy:

**Klasa kompresji:** CCL1 **Kolor:** Karmelowy **Wersja:** Zamknięte palce (ZP) **Rozmiar:** 6 **Długość:** Regular Jak dobrać odpowiedni rozmiar produktów uciskowych JOBST - pomiar KROK po KROKU.

Od prawidłowego doboru medycznych produktów uciskowych w dużym stopniu zależy ich działanie terapeutyczne, dlatego właściwe ich dopasowanie ma kluczowe znaczenie.

Pomiar powinien być wykonany rano, gdy nogi są mniej opuchnięte niż w ciągu dnia.

**Krok 1: zmierz obwody nogi we wskazanych w tabeli punktach:**

cB – obwód nogi w największym miejscu tuż nad kostką, cB1 – obwód łydki w jej dolnej części (w połowie odległości między środkiem łydki, a kostką, czyli punktami cB i cC), cC – obwód łydki w jej najszerszym miejscu, cD – obwód pod kolanem (dwa palce poniżej rzepki), cG – obwód uda (dwa palce poniżej pośladków).

**Krok 2:** zmierz długość nogi (wymiar LK) – odległość od podstawy stopy do wysokości krocza.

**Krok 3:** pamiętaj, aby dokonać pomiaru obu nóg, na których będziesz używał wyrobu uciskowego, zapisz pomiary odpowiednio dla jednej i dla drugiej nogi.

**Krok 4:** porównaj pomiary z tabelą rozmiarów znajdującą się poniżej i wybierz odpowiedni rozmiar.

**Jeśli pomiary pokrywają się w dwóch rozmiarach, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:**

Pomiar nad kostką (cB) powinien być możliwie najbliższy środka zakresu. Jeśli lewa i prawa noga różnią się znacząco wymiarami, należy wybrać dwa różne rozmiary produktu.

Jak dbać o produkty uciskowe JOBST?

Produkty uciskowe JOBST, o ile to możliwe, należy prać codziennie lub co najmniej co drugi dzień. W tym celu można stosować zwykłe łagodne środki piorące. Nie należy stosować dodatków do prania takich jak płyny zmiękczające, wybielacze optyczne lub odplamiacze. Po praniu należy dokładnie wyplukać wyroby uciskowe. Mokre zawinąć w ręcznik i wycisnąć nadmiar wody. Nie wykręcać. Nie suszyć wyrobów uciskowych na grzejniku ani wystawiać ich na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Informacje dotyczące możliwości korzystania z suszarki bębnowej podano na metce wyrobu uciskowego.

**Wskazania** Profilaktyka w czasie ciąży Początkowe zmiany żyłkowe związane z ciążą Łagodny obrzęk stóp, kostek i nóg Uczucie zmęczenia, ciężkości i bólu nóg Zapalenie stawów Pierwotny lub wtórny obrzęk limfatyczny stopnia 0-II wg ISL bez lub z minimalną deformacją (bądź obrzęk limfatyczny stopnia III nie tolerujący wyższego stopnia ucisku) **Podmiot odpowiedzialny**

Podmiot prowadzący reklamę: Essity Poland sp. z o.o. Producent: BSN medical GmbH