


# JOBST ULTRASHEER Podkolanówki uciskowe krótkie CCL2 czarny, rozmiar 2 ZP KRÓTKA DATA 31.12.2024

Cena: 124,99 PLN

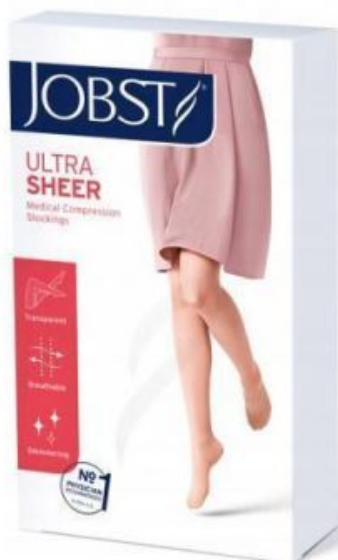

## Opis słownikowy

Opakowanie	1 op.
Producent	ESSITY POLAND SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny

## Opis produktu

**OpisPRODUKT Z KRÓTSZĄ DATĄ WAŻNOŚCI. DATA WAŻNOŚCI PRODUKTU 31.12.2024** JOBST ULTRASHEER Podkolanówki uciskowe krótkie CCL2 czarny, rozmiar 2 ZP

JOBST ULTRASHEER Podkolanówki uciskowe krótkie to **eleganckie, cienkie produkty uciskowe** wyglądają jak najlepszej jakości tradycyjne podkolanówki. Dzięki wysokiej jakości zastosowanych włókien podkolanówki Jobst są **łatwe do nakładania i zdejmowania**, doskonale **dopasowują się do kształtów ciała i pozwalają skórze oddychać**. Są **miękkie w dotyku**, zapewniają nogom doskonały wygląd, a przede wszystkim **wspierają krążenie i zapobiegają powstawaniu obrzęków**.

Cechy szczególne produktu Jobst Ultrasheer Podkolanówki uciskowe: transparentne: delikatny, przezroczysty materiał zapewnia elegancki wygląd oddychające: przepuszczają powietrze zapewniając komfort noszenia przez cały dzień lśniąco: delikatny połysk sprawia, że nogi wyglądają pięknie i zdrowo odprowadzające wilgoć: pomagają utrzymać skórę w suchości przez cały dzień przylegają delikatnie do skóry i pozwalają na mniejszy ucisk punktowy pod kolanem nie zsuwają się zapewniają najwyższy komfort noszenia Dla kogo przeznaczone są Jobst Podkolanówki uciskowe?

Dla kobiet i mężczyzn ze średnimi i zaawansowanymi problemami żylnymi: zmęczonymi i opuchniętymi nogami, pajęczkami, żylakami i przewlekłą chorobą żylną oraz w celach profilaktycznych (w zależności od klasy ucisku).

Specyfikacja produktu:

**Klasa kompresji:** CCL2 (20-30 mmHg)**Kolor:** czarny**Wersja:** palce zamknięte (ZP)**Długość:** petite (krótkie)**Rozmiar:** 2

**Wskazania** Uczucie zmęczenia, ciężkości i bólu nóg Zmiany żyłkowe od stopnia umiarkowanego do zaawansowanego, z obrzękiem lub bez Obrzęki umiarkowanego stopnia Przewlekła niewydolność żylna (PNŻ) stopnia C3–C5 wg CEAP: obrzęki żyłne, zmiany skórne i wygojone owrzodzenia żyłne Zapobieganie nawrotom owrzodzeń żylnych Wspomaganie leczenia zakrzepowego zapalenia żył powierzchownych/zakrzepicy żył powierzchownych (ZZP) Po operacjach żyłaków Po skleroterapii Obrzęki pourazowe i pooperacyjne Pacjenci z zapaleniem stawów z wystarczającym stopniem sprawności manualnej Pierwotny lub wtórny obrzęk limfatyczny stopnia II–III wg ISL z niewielką deformacją Obrzęki żyłno-limfatyczne Obrzęki tłuszczowe **Sposób użycia**

Produkty uciskowe JOBST, o ile to możliwe, należy prać codziennie lub co najmniej co drugi dzień. W tym celu można stosować zwykłe łagodne środki piorące. Nie należy stosować dodatków do prania takich jak płyny zmiękczające, wybielacze optyczne lub odplamiacze. Po praniu należy dokładnie wyplukać wyroby uciskowe. Mokre zawinąć w ręcznik i wycisnąć nadmiar wody. Nie wykręcać. Nie suszyć wyrobów uciskowych na grzejniku ani wystawiać ich na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Informacje dotyczące możliwości korzystania z suszarki bębnowej podano na metce wyrobu uciskowego.

**Ważne** Jak wykonać pomiar i wybrać rozmiar podkolanówek uciskowych?

Pomiar powinien być wykonany rano, gdy nogi są mniej opuchnięte niż w ciągu dnia.

**Krok 1:** Zmierz obwody nogi we wskazanych w tabeli punktach.

**Krok 2:** Pamiętaj, aby dokonać pomiaru obu nóg, na których będziesz używał wyrobu uciskowego, zapisz pomiary odpowiednio dla jednej i dla drugiej nogi.

**Krok 3:** porównaj pomiary z tabelą rozmiarów znajdującą się poniżej i wybierz odpowiedni rozmiar.

Należy wybrać rozmiar, który pokrywa się z większością wymiarów z tabeli zaznaczonych w trakcie mierzenia. Jeśli pomiary pokrywają się w dwóch rozmiarach, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki: pomiar nad kostką (cB) powinien być możliwie najbliższy środka zakresu. Jeśli lewa i prawa noga różnią się znacząco wymiarami, należy wybrać dwa różne rozmiary produktu.

#### Składniki

42% elastan, 58% poliamid

#### Producent

Podmiot prowadzący reklamę: Essity Poland sp. z o.o. Producent: BSN medical GmbH