


# JOBST ULTRASHEER Podkolanówki uciskowe regular CCL1 czarne, rozmiar 4 ZP KRÓTKA DATA 31.12.2024

Cena: 140,98 PLN

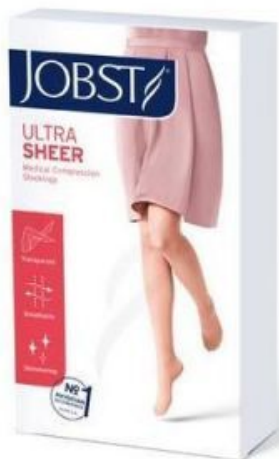

## Opis słownikowy

Producent	JOBST
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny

## Opis produktu

### Opis

PRODUKT Z KRÓTSZĄ DATĄ WAŻNOŚCI. DATA WAŻNOŚCI 31.12.2024

JOBST ULTRASHEER - podkolanówki uciskowe

JOBST ULTRASHEER Podkolanówki uciskowe to eleganckie, cienkie produkty uciskowe wyglądają jak najlepszej jakości tradycyjne podkolanówki. Dzięki wysokiej jakości zastosowanych włókien podkolanówki Jobst są łatwe do nakładania i zdejmowania, doskonale dopasowują się do kształtów ciała i pozwalają skórze oddychać. Są miękkie w dotyku, zapewniają nogom doskonały wygląd, a przede wszystkim wspierają krążenie i zapobiegają powstawaniu obrzęków.

Zalety produktu Jobst Ultrasheer Podkolanówki uciskowe:

transparentne: delikatny, przejrzysty materiał zapewnia elegancki wygląd

oddychające: przepuszczają powietrze zapewniając komfort noszenia przez cały dzień

łśniące: delikatny połysk sprawia, że nogi wyglądają pięknie i zdrowo

odprowadzające wilgoć: pomagają utrzymać skórę w suchości przez cały dzień

przylegają delikatnie do skóry i pozwalają na mniejszy ucisk punktowy pod kolanem

nie zsuwają się

zapewniają najwyższy komfort noszenia

Dla kogo przeznaczone są Jobst Podkolanówki uciskowe?

Dla kobiet z lekkimi i średnimi problemami żylnymi: zmęczonymi i opuchniętymi nogami, pajęczkami, żylakami i przewlekłą chorobą żylną oraz w celach profilaktycznych (w zależności od klasy ucisku).

Kiedy stosować Podkolanówki uciskowe?

Produkt do stosowania na co dzień.

### Wskazania

Wskazania do stosowania podkolanówek uciskowych:

Profilaktyka

Uczucie zmęczenia, ciężkości i bólu nóg

Niewielkie zmiany żylakowe bez obrzęku

Łagodne obrzęki stóp, kostek i nóg

Obrzęki w przebiegu wyrównanej niewydolności krążenia

Pierwotny lub wtórny obrzęk limfatyczny stopnia 0-II wg ISL be deformacji lub z minimalną deformacją bądź obrzęk limfatyczny stopnia III wg ISL przy nietolerancji wyższego stopnia ucisku

Jak wykonać pomiar i wybrać rozmiar podkolanówek uciskowych?

Krok 1: zmierz obwody nogi we wskazanych w tabeli punktach:

cB – obwód nogi w największym miejscu tuż nad kostką,

cB1 – obwód łydki w jej dolnej części (w połowie odległości między środkiem łydki, a kostką, czyli punktami cB i cC),

cC – obwód łydki w jej najszerszym miejscu,

cD – obwód pod kolanem (dwa palce poniżej rzepki).

Krok 2: zmierz długość nogi (wymiar LD) – długość od podstawy stopy do 2 palców pod rzepką.

Krok 3: pamiętaj, aby dokonać pomiaru obu nóg, na których będziesz używał wyrobu uciskowego, zapisz pomiary odpowiednio dla jednej

i dla drugiej nogi.

Krok 4: porównaj pomiary z tabelą rozmiarów znajdującą się poniżej i wybierz odpowiedni rozmiar.

Należy wybrać rozmiar, który pokrywa się z większością wymiarów z tabeli zaznaczonych w trakcie mierzenia.

Jeśli pomiary pokrywają się w dwóch rozmiarach, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

Pomiar nad kostką (cB) powinien być możliwie najbliżej środka zakresu.

Jeśli lewa i prawa noga różnią się znacząco wymiarami, należy wybrać dwa różne rozmiary produktu.

Cechy:

Klasa kompresji: CCL1

Kolor: czarny

Wersja: palce zamknięte (ZP)

Długość: regular

Rozmiar: 4

#### **Sposób użycia**

Skład produktu:

elastan, poliamid.

Podmiot prowadzący reklamę: Essity Poland sp. z o.o.

Producent: BSN medical GmbH

#### **Składniki**

Skład produktu:

elastan, poliamid.

Podmiot prowadzący reklamę: Essity Poland sp. z o.o.

Producent: BSN medical GmbH