


JOBST ULTRASHEER Podkolanówki uciskowe regular CCL1 naturalny, rozmiar 2 ZP KRÓTKA DATA 31.12.2024

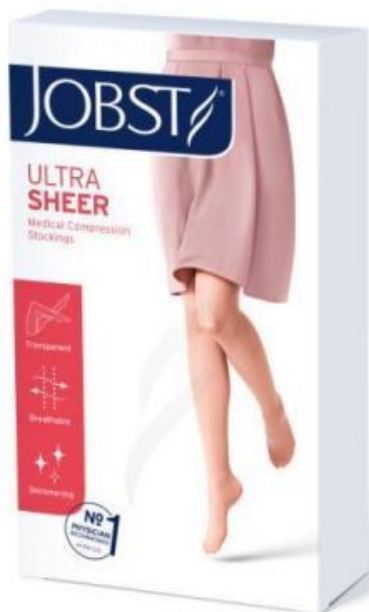

Cena: 127,99 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	1 op.
Producent	ESSITY POLAND SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

OpisPRODUKT Z KRÓTSZĄ DATĄ WAŻNOŚCI. DATA WAŻNOŚCI PRODUKTU 31.12.2024 JOBST ULTRASHEER - podkolanówki uciskowe

JOBST ULTRASHEER Podkolanówki uciskowe to **eleganckie, cienkie produkty uciskowe** wyglądają jak najlepszej jakości tradycyjne podkolanówki. Dzięki wysokiej jakości zastosowanych włókien podkolanówki Jobst są **łatwe do nakładania i zdejmowania**, doskonale **dopasowują się do kształtów ciała i pozwalają skórze oddychać**. Są **miękkie w dotyku**, zapewniają nogom doskonały wygląd, a przede wszystkim **wspierają krążenie i zapobiegają powstawaniu obrzęków**.

Zalety produktu Jobst Ultrasheer Podkolanówki uciskowe: transparentne: delikatny, przejrzysty materiał zapewnia elegancki wygląd oddechające: przepuszczają powietrze zapewniając komfort noszenia przez cały dzień Iśniące: delikatny połysk sprawia, że nogi wyglądają pięknie i zdrowo odprowadzające wilgoć: pomagają utrzymać skórę w suchości przez cały dzień przylegają delikatnie do skóry i pozwalają na mniejszy ucisk punktowy pod kolanem nie zsuwają się zapewniają najwyższy komfort noszenia Dla kogo przeznaczone są Jobst Podkolanówki uciskowe?

Dla kobiet z lekkimi i średnimi problemami żylnymi: zmęczonymi i opuchniętymi nogami, pajęczkami, żylakami i przewlekłą chorobą żylną oraz w celach profilaktycznych (w zależności od klasy ucisku).

Kiedy stosować Podkolanówki uciskowe?

Produkt do stosowania na co dzień.

Cechy:

Klasa kompresji: CCL1**Kolor:** naturalny**Wersja:** palce zamknięte (ZP)**Długość:** regular**Rozmiar:** 2

Wskazania Profilaktyka Uczucie zmęczenia, ciężkości i bólu nóg Niewielkie zmiany żyłkowe bez obrzęku Łagodne obrzęki stóp, kostek i nóg Obrzęki w przebiegu wyrównanej niewydolności krążenia Pierwotny lub wtórny obrzęk limfatyczny stopnia 0-II wg ISL. be deformacji lub z minimalną deformacją bądź obrzęk limfatyczny stopnia III wg ISL przy nietolerancji wyższego stopnia ucisku **Sposób użycia**Sposób pielęgnacji:

Produkty uciskowe JOBST, o ile to możliwe, należy prać codziennie lub co najmniej co drugi dzień. W tym celu można stosować zwykłe łagodne środki piorące. Nie należy stosować dodatków do prania takich jak płyny zmiękczające, wybielacze optyczne lub odplamiacze. Po praniu należy dokładnie wyplukać wyroby uciskowe. Mokra zawinąć w ręcznik i wycisnąć nadmiar wody. Nie wykręcać. Nie suszyć wyrobów uciskowych na grzejniku ani wystawiać ich na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Informacje dotyczące możliwości korzystania z suszarki bębnowej podano na metce wyrobu uciskowego.

WażneJak wykonać pomiar i wybrać rozmiar podkolanówek uciskowych?

Krok 1: zmierz obwody nogi we wskazanych w tabeli punktach:

cB – obwód nogi w największym miejscu tuż nad kostką,cB1 – obwód łydki w jej dolnej części (w połowie odległości między środkiem łydki, a kostką, czyli punktami cB i cC),cC – obwód łydki w jej najszerszym miejscu,cD – obwód pod kolanem (dwa palce poniżej rzepki).

Krok 2: zmierz długość nogi (wymiar LD) – długość od podstawy stopy do 2 palców pod rzepką.

Krok 3: pamiętaj, aby dokonać pomiaru obu nóg, na których będziesz używał wyrobu uciskowego, zapisz pomiary odpowiednio dla jednej i dla drugiej nogi.

Krok 4: porównaj pomiary z tabelą rozmiarów znajdującą się poniżej i wybierz odpowiedni rozmiar.

Należy wybrać rozmiar, który pokrywa się z większością wymiarów z tabeli zaznaczonych w trakcie mierzenia.

Jeśli pomiary pokrywają się w dwóch rozmiarach, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:Pomiar nad kostką (cB) powinien być możliwie najbliższe środka zakresu.Jeśli lewa i prawa noga różnią się znacząco wymiarami, należy wybrać dwa różne rozmiary produktu.

SkładnikiSkład produktu:

elastan 42%, poliamid 58%.

Producent

Podmiot prowadzący reklamę: Essity Poland sp. z o.o.Producent: BSN medical GmbH