

# JOBST ULTRASHEER pończochy uciskowe długie CCL2 czarny, rozmiar 6 ZP KRÓTKA DATA 31.12.2024



Cena: 170,96 PLN

## Opis słownikowy

Producent	JOBST
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny

## Opis produktu

### Opis

JOBST ULTRASHEER pończochy uciskowe długie CCL2 czarny, rozmiar 6 ZP

Pończochy przeciwżylakowe dla kobiet i mężczyzn ze średnimi i zaawansowanymi problemami żylnymi: zmęczonymi i opuchniętymi nogami, pajączkami, żylakami i przewlekłą chorobą żylną oraz w celach profilaktycznych.

Wskazania do stosowania pończoch uciskowych JOBST ULTRA SHEER:

Uczucie zmęczenia, ciężkości i bólu nóg

Zmiany żylakowe od stopnia umiarkowanego do zaawansowanego, z obrzękiem lub bez

Obrzęki umiarkowanego stopnia

Przewlekła niewydolność żylna (PNŻ) stopnia C3–C5 wg CEAP: obrzęki żyłne, zmiany skórne i wygojone owrzodzenia żyłne

Zapobieganie nawrotom owrzodzeń żylnych

Wspomaganie leczenia zakrzepowego zapalenia żył powierzchownych/zakrzepicy żył powierzchownych (ZŻP)

Po operacjach żylaków

Po skleroterapii

Obrzęki pourazowe i pooperacyjne

Pacjenci z zapaleniem stawów z wystarczającym stopniem sprawności manualnej

Pierwotny lub wtórny obrzęk limfatyczny stopnia II–III wg ISL z niewielką deformacją

Obrzęki żylnolimfatyczne

Obrzęki tłuszczowe

Klasa kompresji: CCL2

Kolor: Czarny

Wersja: Palce zamknięte

Rozmiar: 6

Długość: Regular

Szerokość: Standard

Lśniąca: Delikatny połysk sprawia, że nogi wyglądają pięknie i zdrowo.

Oddychająca: Przepuszczają powietrze, zapewniając komfort noszenia przez cały dzień.

Odprowadzające wilgoć: Pomagają utrzymać skórę w suchości przez cały dzień.

Eleganckie, cienkie produkty uciskowe wyglądają jak najlepszej jakości tradycyjne rajstopy, pończochy i podkolanówki.

Oddychająca struktura zapewnia większy komfort i pozwala uniknąć uczucia wilgotnych stóp.

Dzięki wysokiej jakości zastosowanych włókien są łatwe do nakładania i zdejmowania, doskonale dopasowują się do kształtów ciała i pozwalają skórze oddychać.

Są miękkie w dotyku, zapewniają nogom doskonały wygląd, a przede wszystkim wspierają krążenie i zapobiegają powstawaniu obrzęków.

Jak dobrać odpowiedni rozmiar produktów uciskowych JOBST - pomiar KROK po KROKU

Od prawidłowego doboru medycznych produktów uciskowych w dużym stopniu zależy ich działanie terapeutyczne, dlatego właściwe ich dopasowanie ma kluczowe znaczenie.

Pomiar powinien być wykonany rano, gdy nogi są mniej opuchnięte niż w ciągu dnia.

Krok 1: zmierz obwody nogi we wskazanych w tabeli punktach:

cB – obwód nogi w najwęższym miejscu tuż nad kostką,

cB1 – obwód łydki w jej dolnej części (w połowie odległości między środkiem łydki, a kostką, czyli punktami cB i cC),

cC – obwód łydki w jej najszerszym miejscu,

cD – obwód pod kolanem (dwa palce poniżej rzepki).

cG – obwód uda (dwa palce poniżej pośladków).

Krok 2: zmierz długość nogi (wymiar LG) – mierzymy od podstawy nogi do punktu cG (punkt pomiaru obwodu uda – 2 palce poniżej pośladków).

Krok 3: pamiętaj, aby dokonać pomiaru obu nóg, na których będziesz używał wyrobu uciskowego, zapisz pomiary odpowiednio dla jednej i dla drugiej nogi.

Krok 4: porównaj pomiary z tabelą rozmiarów znajdującą się poniżej i wybierz odpowiedni rozmiar.

Należy wybrać rozmiar, który pokrywa się z większością wymiarów z tabeli zaznaczonych w trakcie mierzenia.

Jeśli pomiary pokrywają się w dwóch rozmiarach, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

Pomiar nad kostką (cB) powinien być możliwie najbliżej środka zakresu.

Jeśli lewa i prawa noga różnią się znacząco wymiarami, należy wybrać dwa różne rozmiary produktu.

Skład produktu:

47% elastan, 53% poliamid.

Sposób pielęgnacji:

Produkty uciskowe JOBST, o ile to możliwe, należy prać codziennie lub co najmniej co drugi dzień. W tym celu można stosować zwyczajne łagodne środki piorące. Nie należy stosować dodatków do prania takich jak płyny zmiękczające, wybielacze optyczne lub odplamiacze. Po praniu należy dokładnie wyptukać wyroby uciskowe. Mokre zawinąć w ręcznik i wycisnąć nadmiar wody. Nie wykręcać. Nie suszyć wyrobów uciskowych na grzejniku ani wystawiać ich na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Informacje dotyczące możliwości korzystania z suszarki bębnowej podano na metce wyrobu uciskowego.

Podmiot prowadzący reklamę: Essity Poland sp. z o.o.

Producent: BSN medical GmbH