

JOBST ULTRASHEER pończochy uciskowe krótkie CCL2 czarny, rozmiar 2 ZP KRÓTKA DATA 31.12.2024



Cena: 156,99 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	1 komplet
Producent	JOBST
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

OpisPRODUKT Z KRÓTSZĄ DATĄ WAŻNOŚCI. DATA WAŻNOŚCI 31.12.2024 JOBST ULTRASHEER pończochy uciskowe krótkie CCL2 czarny, rozmiar 2 ZP

Pończochy przeciwżylakowe dla kobiet i mężczyzn ze średnimi i zaawansowanymi problemami żylnymi: zmęczonymi i opuchniętymi nogami, pajęczkami, żylakami i przewlekłą chorobą żylną oraz w celach profilaktycznych.

Cechy:

Klasa kompresji: CCL2Kolor: CzarnyWersja: Palce zamknięteRozmiar: 2Długość: Petite (krótkie)Szerokość: Standard

Lśniąco: Delikatny połysk sprawia, że nogi wyglądają pięknie i zdrowo.**Oddychające:** Przepuszczają powietrze, zapewniając komfort noszenia przez cały dzień.**Odprowadzające wilgoć:** Pomagają utrzymać skórę w suchości przez cały dzień.

Eleganckie, cienkie produkty uciskowe wyglądają jak najlepszej jakości tradycyjne rajstopy, pończochy i podkolanówki.

Oddychająca struktura zapewnia większy komfort i pozwala uniknąć uczucia wilgotnych stóp. Dzięki wysokiej jakości zastosowanych włókien są łatwe do nakładania i zdejmowania, doskonale dopasowują się do kształtów ciała i pozwalają skórze oddychać.

Są miękkie w dotyku, zapewniają nogom doskonały wygląd, a przede wszystkim wspierają krążenie i zapobiegają powstawaniu obrzęków.

Jak dobrać odpowiedni rozmiar produktów uciskowych JOBST - pomiar KROK po KROKU

Od prawidłowego doboru medycznych produktów uciskowych w dużym stopniu zależy ich działanie terapeutyczne, dlatego właściwe ich dopasowanie ma kluczowe znaczenie. Pomiar powinien być wykonany rano, gdy nogi są mniej opuchnięte niż w ciągu dnia. **Krok 1:** zmierz obwody nogi we wskazanych w tabeli punktach: cB – obwód nogi w najwyższym miejscu tuż nad kostką, cB1 – obwód łydki w jej dolnej części (w połowie odległości między środkiem łydki, a kostką, czyli punktami cB i cC), cC – obwód łydki w jej najszerszym miejscu, cD – obwód pod kolanem (dwa palce poniżej rzepki), cG – obwód uda (dwa palce poniżej pośladków). **Krok 2:** zmierz długość nogi (wymiar LG) – mierzymy od podstawy nogi do punktu cG (punkt pomiaru obwodu uda – 2 palce poniżej pośladków). **Krok 3:** pamiętaj, aby dokonać pomiaru obu nóg, na których będziesz używał wyrobu uciskowego, zapisz pomiary odpowiednio dla jednej i dla drugiej nogi. **Krok 4:** porównaj pomiary z tabelą rozmiarów znajdującą się poniżej i wybierz odpowiedni rozmiar. Należy wybrać rozmiar, który pokrywa się z większością wymiarów z tabeli zaznaczonych w trakcie mierzenia. Jeśli pomiary pokrywają się w dwóch rozmiarach, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki: Pomiar nad kostką (cB) powinien być możliwie najbliższy środka zakresu. Jeśli lewa i prawa noga różnią się znacząco wymiarami, należy wybrać dwa różne rozmiary produktu.

Sposób pielęgnacji:

Produkty uciskowe JOBST, o ile to możliwe, należy prać codziennie lub co najmniej co drugi dzień. W tym celu można stosować zwykłe łagodne środki piorące. Nie należy stosować dodatków do prania takich jak płyny zmiękczające, wybielacze optyczne lub odplamiacze. Po praniu należy dokładnie wyptukać wyroby uciskowe. Mokre zawinąć w ręcznik i wycisnąć nadmiar wody. Nie wykręcać. Nie suszyć wyrobów uciskowych na grzejniku ani wystawiać ich na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Informacje dotyczące możliwości korzystania z suszarki bębnowej podano na metce wyrobu uciskowego.

Wskazania Uczucie zmęczenia, ciężkości i bólu nóg Zmiany żyłkowe od stopnia umiarkowanego do zaawansowanego, z obrzękiem lub bez Obrzęki umiarkowanego stopnia Przewlekła niewydolność żylna (PNŻ) stopnia C3–C5 wg CEAP: obrzęki żyłne, zmiany skórne i wygojone owrzodzenia żyłne Zapobieganie nawrotom owrzodzeń żylnych Wspomaganie leczenia zakrzepowego zapalenia żył powierzchownych/zakrzepicy żył powierzchownych (ZŻP) Po operacjach żyłaków Po skleroterapii Obrzęki pourazowe i pooperacyjne Pacjenci z zapaleniem stawów z wystarczającym stopniem sprawności manualnej Pierwotny lub wtórny obrzęk limfatyczny stopnia II–III wg ISL z niewielką deformacją Obrzęki żyłno-limfatyczne Obrzęki tłuszczowe **Składniki**

47% elastan, 53% poliamid.

Podmiot odpowiedzialny

Podmiot prowadzący reklamę: Essity Poland sp. z o.o. Producent: BSN medical GmbH