


# JOBST ULTRASHEER rajstopy uciskowe CCL1 naturalny, rozmiar 5 ZP KRÓTKA DATA 31.12.2024

Cena: 180,99 PLN

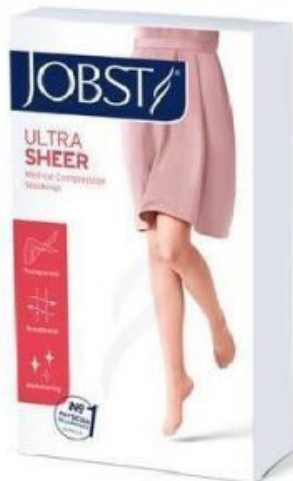

## Opis słownikowy

Opakowanie	1 komplet
Producent	JOBST
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny

## Opis produktu

**OPRODUKT Z KRÓTSZĄ DATĄ WAŻNOŚCI. DATA WAŻNOŚCI PRODUKTU 31.12.2024** JOBST® UltraSheer - Eleganckie rajstopy uciskowe dla kobiet

**Rajstopy uciskowe JOBST® Ultra Sheer to eleganckie, cienkie i transparentne produkty uciskowe dla kobiet**, które wyglądają jak najlepszej jakości tradycyjne rajstopy. Dzięki wysokiej jakości zastosowanych włókien są łatwe do nakładania i zdejmowania, doskonale dopasowują się do kształtów ciała i pozwalają skórze oddychać. Oddychająca struktura zapewnia większy komfort i pozwala uniknąć uczucia wilgotnych stóp, zachowując suchość przez cały dzień. Rajstopy są miękkie w dotyku, zapewniają nogom doskonały wygląd, a przede wszystkim wspierają krążenie i zapobiegają powstawaniu obrzęków. **Delikatny połysk** sprawia, że nogi wyglądają pięknie i zdrowo.

Cechy: **Klasa kompresji:** CCL1 **Kolor:** Naturalny **Wersja:** Palce zamknięte **Rozmiar:** 5 Dla kogo stworzone są rajstopy uciskowe Ultra Sheer?

Dla kobiet z lekkimi i średnimi problemami żylnymi: zmęczonymi i opuchniętymi nogami, pajęczkami, żylakami i przewlekłą chorobą żylną oraz w celach profilaktycznych (w zależności od klasy ucisku).

Jak dobrać odpowiedni rozmiar produktów uciskowych JOBST - pomiar KROK po KROKU.

Od prawidłowego doboru medycznych produktów uciskowych w dużym stopniu zależy ich działanie terapeutyczne, dlatego właściwe ich dopasowanie ma kluczowe znaczenie. Pomiar powinien być wykonany rano, gdy nogi są mniej opuchnięte niż w ciągu dnia.

**Krok 1: zmierz obwody nogi we wskazanych w tabeli punktach:**

cB – obwód nogi w największym miejscu tuż nad kostką, cB1 – obwód łydki w jej dolnej części (w połowie odległości między środkiem łydki, a kostką, czyli punktami cB i cC), cC – obwód łydki w jej najszerszym miejscu, cD – obwód pod kolanem (dwa palce poniżej rzepki), cG – obwodu uda (dwa palce poniżej pośladków), cH – obwodu w najszerszym miejscu bioder, cT – obwód w pasie.

**Krok 2:** zmierz długość nogi (wymiar LK) – odległość od podstawy stopy do wysokości krocza.

**Krok 3:** pamiętaj, aby dokonać pomiaru obu nóg, na których będziesz używał wyrobu uciskowego, zapisz pomiary odpowiednio dla jednej i dla drugiej nogi.

**Krok 4:** porównaj pomiary z tabelą rozmiarów znajdującą się poniżej i wybierz odpowiedni rozmiar.

Należy wybrać rozmiar, który pokrywa się z większością wymiarów z tabeli zaznaczonych w trakcie mierzenia.

**Jeśli pomiary pokrywają się w dwóch rozmiarach, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:** Pomiar nad kostką (cB) powinien być możliwie najbliższe środka zakresu. Jeśli lewa i prawa noga różnią się znacząco wymiarami, należy wybrać dwa różne rozmiary produktu.

**Wskazania** Profilaktyka Uczucie zmęczenia, ciężkości i bólu nóg Niewielkie zmiany żyłakowe bez obrzęku Łagodne obrzęki nóg, stóp, kostek Obrzęki w przebiegu wyrównanej niewydolności krążenia Pierwotny lub wtórny obrzęk limfatyczny stopnia 0-II wg ISL be deformacji lub z minimalną deformacją bądź obrzęk limfatyczny stopnia III wg ISL przy nietolerancji wyższego stopnia ucisku **Składniki**

elastan, poliamid.

**Ważne** Jak pielęgnować rajstopy uciskowe JOBST?

**Produkty uciskowe JOBST**, o ile to możliwe, należy prać codziennie lub co najmniej co drugi dzień. W tym celu można stosować zwykłe łagodne środki piorące. Nie należy stosować dodatków do prania takich jak płyny zmiękczające, wybielacze optyczne lub odplamiacze. Po praniu należy dokładnie wyplukać wyroby uciskowe. Mokre zawinąć w ręcznik i wycisnąć nadmiar wody. Nie wykręcać. Nie suszyć wyrobów uciskowych na grzejniku ani wystawiać ich na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Informacje dotyczące możliwości korzystania z suszarki bębnowej podano na metce wyrobu uciskowego.

**Podmiot odpowiedzialny**

Podmiot prowadzący reklamę: Essity Poland sp. z o.o. Producent: BSN medical GmbH