


JOBST ULTRASHEER Rajstopy uciskowe CCL2 czarny, rozmiar 5 ZP KRÓTKA DATA 31.12.2024

Cena: 185,48 PLN

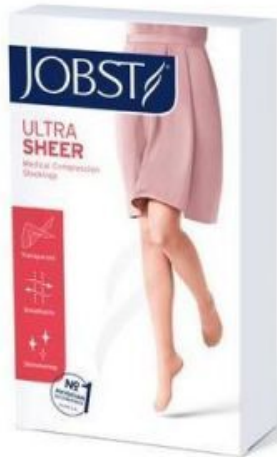

Opis słownikowy

Producent	JOBST
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Opis

PRODUKT Z KRÓTSZĄ DATĄ WAŻNOŚCI. DATA WAŻNOŚCI 31.12.2024

JOBST® UltraSheer - rajstopy uciskowe, przeciwżylakowe

Eleganckie, cienkie, transparentne produkty uciskowe wyglądają jak najlepszej jakości tradycyjne rajstopy. Dzięki wysokiej jakości zastosowanych włókien są łatwe do nakładania i zdejmowania, doskonale dopasowują się do kształtów ciała i pozwalają skórze oddychać. Są miękkie w dotyku, zapewniają nogom doskonały wygląd, a przede wszystkim wspierają krążenie i zapobiegają powstawaniu obrzęków.

Wskazania

Dla kogo? Wskazania:

Dla kobiet ze średnimi i zaawansowanymi problemami żylnymi: zmęczonymi i opuchniętymi nogami, pajęczkami, żylakami i przewlekłą chorobą żylną oraz w celach profilaktycznych.

Klasa kompresji: CCL2

Kolor: Czarny

Wersja: Palce zamknięte

Rozmiar: 5

Wskazania do stosowania

Uczucie zmęczenia, ciężkości i bólu nóg

Zmiany żylakowe od stopnia umiarkowanego do zaawansowanego, z obrzękiem lub bez

Obrzęki umiarkowanego stopnia

Przewlekła niewydolność żylna (PNŻ) stopnia C3–C5 wg CEAP: obrzęki żyłne, zmiany skórne i wygojone owrzodzenia żyłne

Zapobieganie nawrotom owrzodzeń żylnych

Wspomaganie leczenia zakrzepowego zapalenia żył powierzchownych/zakrzepicy żył powierzchownych (ZŻP)

Po operacjach żylaków

Po skleroterapii

Obrzęki pourazowe i pooperacyjne

Pacjenci z zapaleniem stawów z wystarczającym stopniem sprawności manualnej

Pierwotny lub wtórny obrzęk limfatyczny stopnia II–III wg ISL z niewielką deformacją

Obrzęki żylnolimfatyczne

Obrzęki tłuszczowe

Jak dobrać odpowiedni rozmiar produktów uciskowych JOBST - pomiar KROK po KROKU.

Od prawidłowego doboru medycznych produktów uciskowych w dużym stopniu zależy ich działanie terapeutyczne, dlatego właściwe ich dopasowanie ma kluczowe znaczenie.

Pomiar powinien być wykonany rano, gdy nogi są mniej opuchnięte niż w ciągu dnia.

Krok 1: zmierz obwody nogi we wskazanych w tabeli punktach:

cB – obwód nogi w największym miejscu tuż nad kostką,

cB1 – obwód łydki w jej dolnej części (w połowie odległości między środkiem łydki, a kostką, czyli punktami cB i cC),

cC – obwód łydki w jej najszerszym miejscu,

cD – obwód pod kolanem (dwa palce poniżej rzepki),

cG – obwodu uda (dwa palce poniżej pośladków),

cH – obwodu w najszerszym miejscu bioder,

cT – obwód w pasie.

Krok 2: zmierz długość nogi (wymiar LK) – odległość od podstawy stopy do wysokości krocza.

Krok 3: pamiętaj, aby dokonać pomiaru obu nóg, na których będziesz używał wyrobu uciskowego, zapisz pomiary odpowiednio dla jednej i dla drugiej nogi.

Krok 4: porównaj pomiary z tabelą rozmiarów znajdującą się poniżej i wybierz odpowiedni rozmiar.

Należy wybrać rozmiar, który pokrywa się z większością wymiarów z tabeli zaznaczonych w trakcie mierzenia.

Jeśli pomiary pokrywają się w dwóch rozmiarach, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

Pomiar nad kostką (cB) powinien być możliwie najbliższe środka zakresu.

Jeśli lewa i prawa noga różnią się znacząco wymiarami, należy wybrać dwa różne rozmiary produktu.

Składniki

Skład produktu

47% elastan, 53% poliamid

Ważne

Sposób pielęgnacji

Produkty uciskowe JOBST, o ile to możliwe, należy prać codziennie lub co najmniej co drugi dzień. W tym celu można stosować zwykłe łagodne środki piorące. Nie należy stosować dodatków do prania takich jak płyny zmiękczające, wybielacze optyczne lub odplamiacze. Po praniu należy dokładnie wyplukać wyroby uciskowe. Mokra zawinąć w ręcznik i wycisnąć nadmiar wody. Nie wykręcać. Nie suszyć wyrobów uciskowych na grzejniku ani wystawiać ich na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Informacje dotyczące możliwości korzystania z suszarki bębnowej podano na metce wyrobu uciskowego.

Podmiot prowadzący reklamę: Essity Poland sp. z o.o.

Producent: BSN medical GmbH