

KLESZCZ OUT Przyrząd do usuwania kleszczy



Cena: 21,39 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	ALBERT-POLSKA
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

OpisPrzyrząd do usuwania kleszczy KleszczOut jest prostą w użyciu pompką, która pozwoli szybko i precyzyjnie pozbyć się kleszcza z ciała. Wszechstronna i wysokiej jakości pompka poradzi sobie nie tylko z kleszczem, ale również zassie jad po ukąszeniu – komarów, pszczoł, czy nawet żmij i skorpionów. Produkt dedykujemy osobom aktywnym, spędzającym dużo czasu na wypoczynku, spacerach, podczas grzybobrania lub pracy w plenerze. Powstała w końcówce pompki próżnia powoduje "wysysanie" kleszcza z ciała i nie pozostawia żadnych części pasożyta w ciele człowieka. Przyrząd jest najbardziej skuteczny we wstępnym okresie wszczępienia się kleszcza. W przypadkach bardziej skomplikowanych należy niezwłocznie udać się do lekarza. Dzięki zastosowaniu bardzo szczelnej, gumowej uszczelki, skuteczność działania pompki jest zagwarantowana na bardzo długi czas. 1. Aby przygotować przyrząd do użycia, należy wcisnąć gumowy tłok do oporu. 2. Przyłożyć końcówkę do ciała w miejscu wszczępienia się kleszcza (wprowadzenia jadu). 3. Docisnąć przyrząd do ciała i tak utrzymując docisk, stopniowo, powoli odciągać tłok do odpowiedniej pozycji. Miejsce ukąszenia powinno znajdować się w centralnej części przyłożenia końcówki. 4. Przytrzymać przyrząd w tej pozycji około 10-15 sekund, w razie potrzeby powtórzyć zabieg. 5. Zdezynfekować miejsce ukąszenia środkami odkażającymi. 6. Końcówkę przyrządu przemywać wodą z mydłem, zdezynfekować środkiem odkażającym. Uwaga! Usunięcie kleszcza może okazać się utrudnione w przypadku wszczępienia się go w miejscach uniemożliwiających wytworzenie próżni – np. we włosach, w zagłębieniach, na zgięciach. Nie używać przyrządu na zranionej skórze, w okolicach oczu, zewnętrznych narządach płciowych. Nie stosować u dzieci poniżej 3 lat.