

KOMPRESY Z GAZY NIEJAŁOWE 8-warstwowe 5 cm x 5 cm 100 sztuk APTEO CARE



Cena: 5,20 PLN

Opis słownikowy

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Opis Kompresy po wyjąłwieniu przeznaczone są do bezpośredniego opatrywania zranionej skóry, jako bariera mechaniczna, do ucisku lub absorpcji wysięków. **Sposób użycia** Kompresów nie należy stosować w polu operacyjnym. Wyrób przed użyciem wymaga sterylizacji parą wodną wg normy EN-ISO 17665-1. W celu sterylizacji wyrób należy wyjąć z opakowania. Sterylizację przeprowadzić w sterylizatorach parowych w temperaturze 121 °C – czas ekspozycji 20 minut, lub w temperaturze 134 °C – czas ekspozycji 10 minut.